



АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТОВ

общество с ограниченной ответственностью

«Научный центр информационной медицины

«Лечение Информатика Диагностика Обучение»

(ООО НЦИМ «ЛИДО»)

123098, Москва, ул. Новошукшинская, д. 7, к.1,

scimlido@mail.ru

www.lido.msk.ru

**МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТОВ МИНИТАГ,
КАМЕРТОН, КАМЕРТОН ЗДОРОВЬЯ В ВЕТЕРИНАРИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОБАК**

КАЛМЫКОВА Е.А.

2023

Здравствуйте, дорогие друзья!

Наша с вами жизнь имеет особенный оттенок, поскольку рядом с нами идут наши дорогие питомцы: собаки разных пород, размеров и темперамента. Они разные, но такие любимые, и все они безмерно радуют нас самым фактом своего существования!

Но радость эта бывает омрачена недомоганием и болезнями, которые, порой, огорчают нас куда больше, нежели наши собственные. И не зря, ведь человек, хотя-бы может сказать, где и как у него болит, а вот с собакой это гораздо сложнее. И с лечением наших питомцев тоже не всё ладно. В результате изменений в экологии, условиях жизни и питания животных, применение лекарственных средств нередко оказывается малоэффективным и, вопреки ожидаемому эффекту, часто приводит к развитию осложнений, таких как аллергические реакции, дисбактериоз кишечника, нарушение функции печени и почек.

Есть ли иное средство лечения, а порой, и средство «скорой помощи» нашим собакам, когда до ветеринара далеко, а как действуют имеющиеся под рукой лекарства непонятно? Такой инструмент есть.

Аппараты МИНИТАГ, КАМЕРТОН и Камертон Здоровья уже тридцать лет служат на благо здоровья человека в общей медицинской практике. Но, на протяжении этого времени их пациентами были не только люди, но и лошади, коровы, собаки, кошки, птицы, морские свинки, хомяки, крысы, мыши, рыбки, улитки, и другая живность. И все они благополучно излечились от своих недугов, благодаря решимости и заботе своих хозяев, и нашим аппаратам.

Главный вопрос, который многие задают себе: «А справлюсь ли я с лечением своей собаки?». Мы, хозяева собак - люди разных возрастов, социальных групп и профессий. Кем бы мы не были, ради здоровья наших питомцев, мы можем многому научиться, тем более большинство из нас имеют некоторые познания в биологии и медицине. Любой человек способен лечить мелкие раны у питомца, давать лекарства, правильно кормить, бороться с паразитами, придерживаться рекомендаций ветеринара. У многих владельцев собак есть просто природное чутье, при полном отсутствии

академических познаний в ветеринарной науке. Конечно, некоторые вопросы могут быть решены только квалифицированным ветеринаром. Это относится к постановке точного диагноза, лабораторным исследованиями и жизнеугрожающим состояниям. Тут без навыка профессионала обойтись сложно, даже если вы дипломированный кардиолог или нейрохирург.

Однако хозяевам, не знакомым с основами диагностики и лечения питомцев, настоятельно рекомендуем предельную осторожность. Некоторые разделы этой книги предназначены главным образом для тех, кто имеет представление о ветеринарной или медицинской помощи (разделы о переломах, неврологии).

Ни один нормальный взрослый человек не станет причинять ненужную боль бессловесному существу. И, конечно, никто не захочет рисковать жизнью своего любимца. Поэтому во всех случаях, когда вы не уверены, что успешно справитесь с болезнью или раной вашей собаки, скорее обращайтесь к ветеринару.

Необходимость написать руководство по применению аппаратов МИНИТАГ, КАМЕРТОН и Камертон Здоровья в ветеринарии стояла уже давно, но мешало устойчивое мировоззрение натуралиста, сводящаяся к концепции: «организм Мухтара ничем особо не отличается от организма лейтенанта Глазычева и панкреатит у них лечится одинаково». Да простят меня ветеринары. В нашем руководстве для хозяев собак вы не найдете справочника по болезням, только «узкое» руководство по применению аппаратов в конкретных случаях, когда диагноз уже установлен, известен или очевиден.

Здоровья Вам и Вашим дорогим и любимым питомцам!

Елена Калмыкова, д.м.н., проф., заместитель генерального директора ООО НЦИМ «ЛИДО», собачница с 1980-х годов, ныне «мама» московского той-терьера.

Информационно-волновая терапия в ветеринарии

Информационно-волновая терапия (ИВТ), осуществляемая аппаратами МИНИТАГ (1998-2008), КАМЕРТОН и Камертон Здоровья (2007 - по н.в.), которая, в след за использованием в лечении людей, около 30 лет используется в ветеринарной практике, относится к одному из наиболее эффективных методов безмедикаментозной терапии живых организмов.

ИВТ, как лечебный прием, имеет более чем 40-летнюю историю применения и позволяет воздействовать на организм животных двумя способами. Первый – непосредственное наружное воздействие на повреждённые части тела или проекцию больного органа на коже животного. Второй путь - воздействие на акупунктурные или биологически активные точки больного животного.

Диапазон применения метода ИВТ в ветеринарии очень широкий. В целом, ИВТ позволяет снять болевые ощущения у животного, повышает уровень его иммунитета, оказывает расслабляющее действие, нормализует обмен веществ, повышает качество и скорость заживления.

Если же говорить о конкретных заболеваниях, с которыми эффективно справляется ИВТ, то список недугов займет не одну страницу: инфекции, аллергии, нарушения опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-сосудистой системы, неврологические заболевания, заболевания пищеварительного тракта, заболевания кожи, расстройства мочеполовой системы, – то есть нарушения работы практически всех органов и систем.

Информационно-волновая терапия аппаратами МИНИТАГ, КАМЕРТОН и Камертон Здоровья помогает четвероногим восстановиться при недомоганиях, проблемах и нарушениях работы внутренних органов, после операций, она используется в профилактических целях и для общего укрепления организма.

Обычно на лечение ИВТ решаются те хозяева, которые уже не надеются спасти своего любимца средствами традиционной медицины. Однако начинать ИВТ нужно именно одновременно с лекарственной терапией, а зачастую, ещё до неё.

Аппарат Камертон Здоровья подойдёт хозяевам собак для домашнего применения. Помните, что он способен лечить не только ваших питомцев, но и всю семью!

Аппарат КАМЕРТОН, сделанный для профессионального применения, займёт достойное место не только в наборе ветеринарной клиники. Он незаменимый элемент в арсенале заводчика. Ведь с помощью аппарата КАМЕРТОН можно обеспечить оздоровление и выхаживание щенков, послеродовое восстановление их мамы, а в период беременности – её профилактику и лечение, без риска навредить потомству.

Информационно-волновая терапия аппаратами КАМЕРТОН и Камертон Здоровья не требует специальных условий для её проведения (помещений, мебели, приспособлений и т.д.). Её можно проводить в любых удобных вам условиях. Процедуры может проводить ветеринарный врач, фельдшер или сестра, кинолог или другой специалист, а также сам хозяин животного. Продолжительность сеанса терапии редко превышает 20-30 минут.

Основные преимущества ИВТ:

- неинвазивность, безболезненность, безопасность и безвредность;
- уникальные реабилитационные и регенерирующие способности, быстрая и качественная заживляемость любого раневого процесса;
- сочетание воздействия на акупунктурные точки и местного воздействия;
- воздействует на повреждённые клеточные структуры, обеспечивая природный ритм их восстановления;
- восстанавливает иммунитет и гормональный обмен в организме;
- нормализует обменные процессы;
- не имеет противопоказаний и побочных эффектов при лечении новорожденных, беременных или старых животных;
- подходит для лечения не только млекопитающих, но и птиц, рептилий, земноводных, рыб и моллюсков;
- подходит для лечения мелких животных, лекарственная терапия которых сложна;
- возможность воздействия на воду, как элемент питания или среду обитания, для ее структуризации и улучшения.

Крепкого Здоровья Вам, Вашим собакам и другим питомцам!

Леонид Наливайко, генеральный директор ООО НЦИМ «ЛИДО», собачник с 1983 года, ныне «папа» московского той-терьера.

Как лечить собаку в домашних условиях.

Процедура может быть растянута во времени, поэтому позаботьтесь о своем комфорте и доверительном положении питомца.

Можно расположиться на полу или диване.

Сделайте положения питомца и ваше максимально комфортными.

Подключая аппарат, воспользуйтесь удлинителем, так вы предотвратите выпадение тяжелого адаптера аппарата из настенной розетки и сохраните его от повреждения.

В ряде случаев можно воспользоваться держателем аппарата, собранным на основе микрофонных штатива или пантографа, и держателя микрофона. Аппараты легко помещаются и хорошо удерживаются держателем микрофона. Вам только следует придерживать аппарат от смещения из зоны терапии.


Собаки благодарные пациенты. Скорость репарации (заживления) у них выше, чем у человека, поэтому чудеса исцеления вы увидите гораздо быстрее.

Не забывайте о себе, поскольку изначально, аппараты были предназначены для лечения людей и лишь со временем, благодаря неравнодушным, ищущим и, безусловно, талантливым ветеринарам, стали использоваться для лечения животных, птиц, рыб и других «братьев наших меньших».

ПРОФИЛАКТИКА И СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Здоровый щенок


Для нормализации состояния и развития щенка - в первые 10 дней после рождения, – ежедневно, 1 раз в день, по 5-7 минут на пупок.

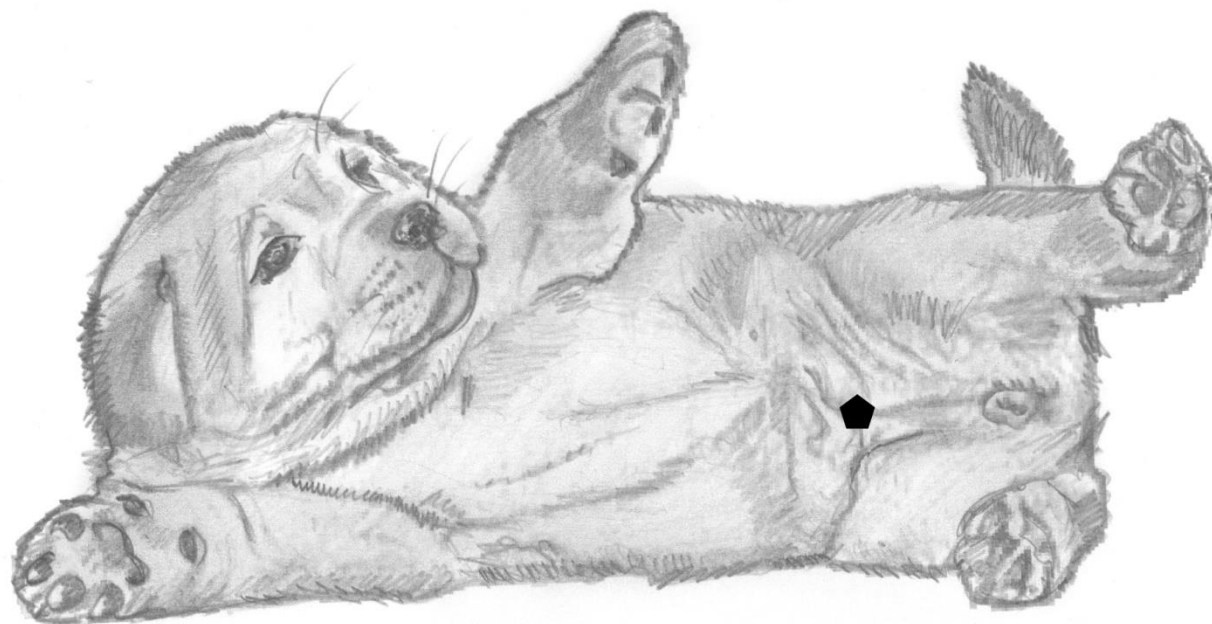

В ПЕРВЫЕ 3-4 ДНЯ НАЧАЛА ПРИКОРМА

Для нормализации работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) - в течение 3-4 дней, ежедневно, 1 раз в день, по 5 минут:


1. на пупок;
2. окончание свободного 13 ребра слева.

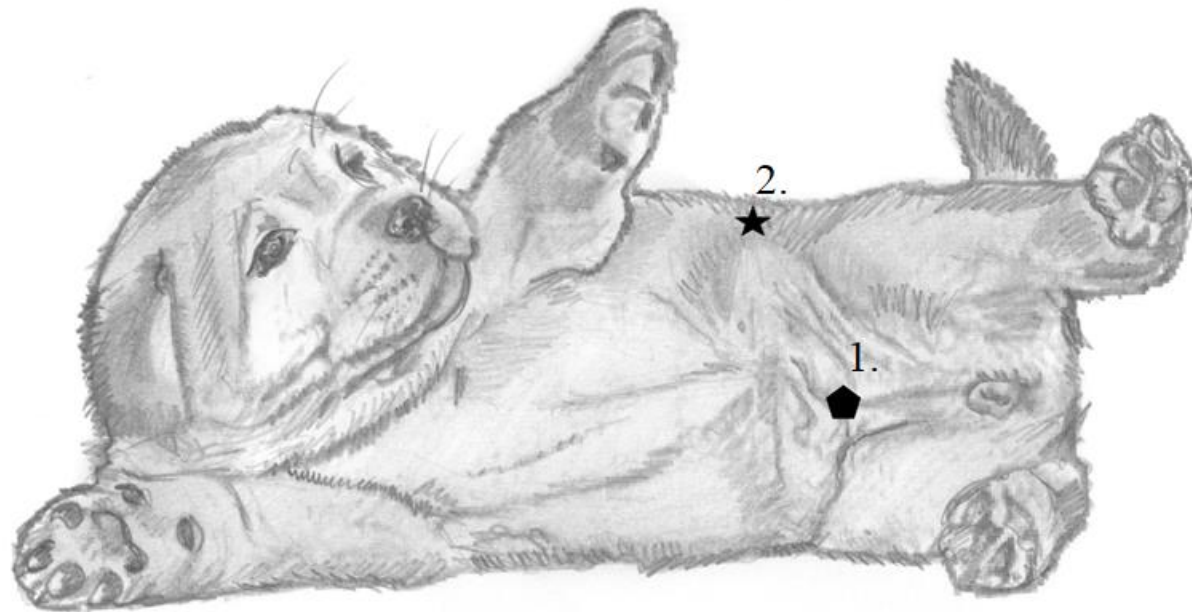

«ТРУСИШКИ»

Для стабилизации психоэмоционального состояния после пережитого стресса, поместив собаку в комфортные безопасные условия, в течение 1 дня, 1-2 раза в день, по 5 минут на точку:


1. на грудину (точка расположена на пересечении срединной линии и линии, проходящей подмышками)
2. на правую переднюю лапу чуть выше запястной подушечки.

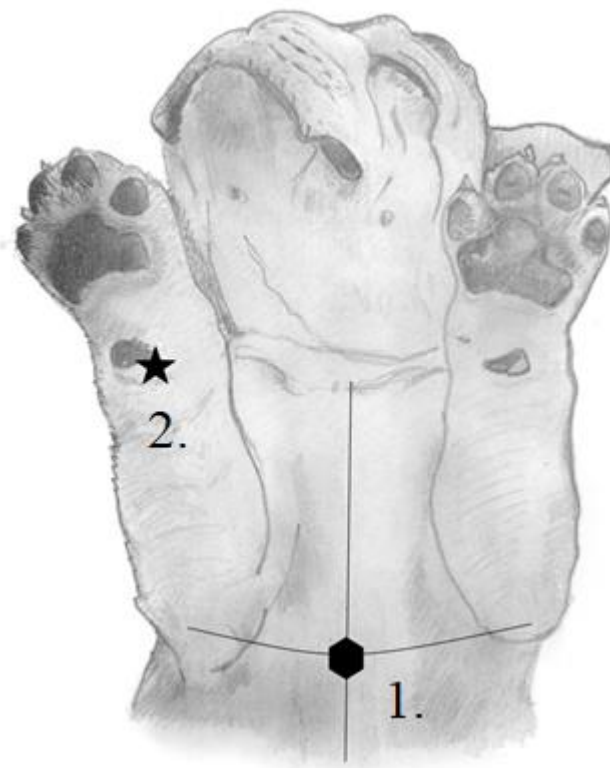

ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ

Для стабилизации состояния собаки после прививки и купирования ответных реакций, в течение 3-х дней после прививки, ежедневно, 1 раз в день, по 5 минут на каждую точку:


1. зона между бровями;
2. на грудину (точка расположена на пересечении срединной линии и линии, проходящей подмышками)
3. на правую переднюю лапу чуть выше запястной подушечки.

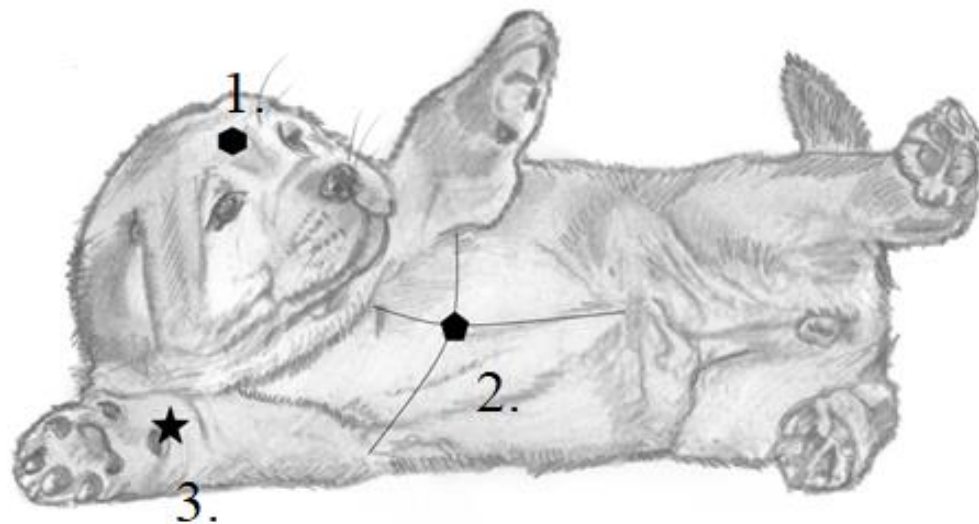

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИСТОГОННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Для нормализации работы ЖКТ – в течении 3-х дней, ежедневно, 1 раз в день, по 5 минут на каждую точку:



1. на свободном крае 12 ребра справа;
2. на макушку (самая верхняя точка черепа);
3. над первым грудным позвонком (самая выступающая часть холки)

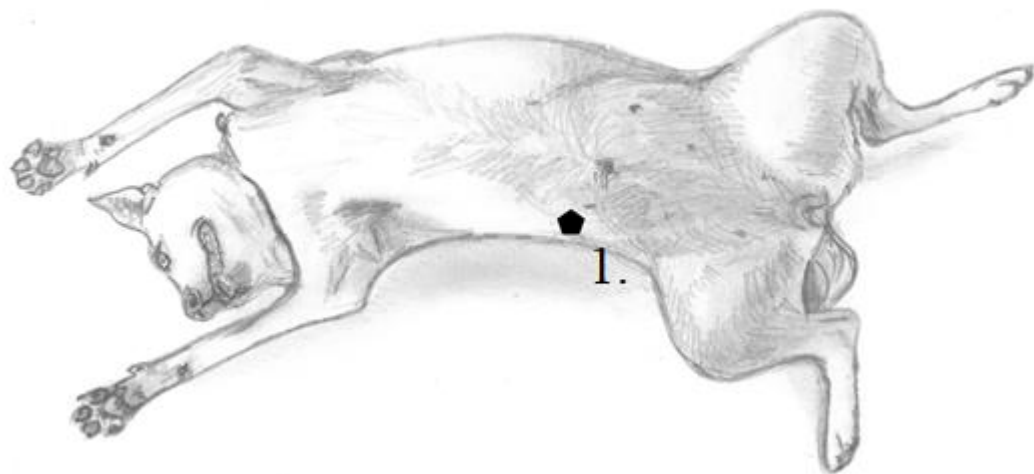

ЗДОРОВАЯ СЛУЖЕБНАЯ, ОХОТНИЧЬЯ СОБАКА

Для восстановления и нормализации состояния собаки после интенсивного рабочего дня, 1 раз в день, по 5-7 минут на каждую точку:


1. на макушку (самая верхняя точка черепа);
2. в ямку под затылочной костью;
3. на правую переднюю лапу чуть выше запястной подушечки.

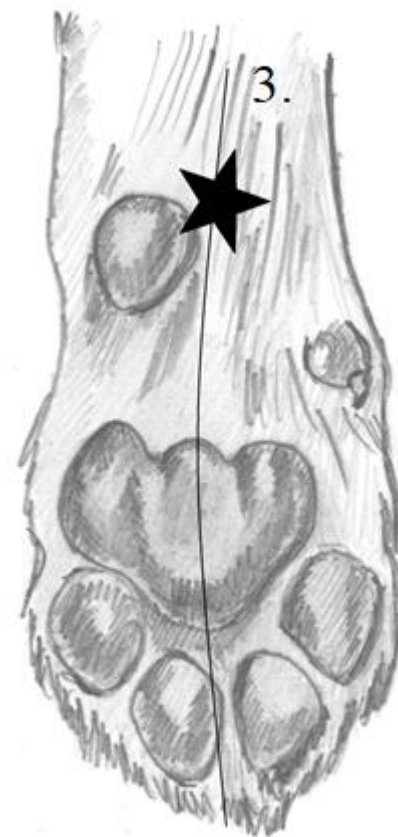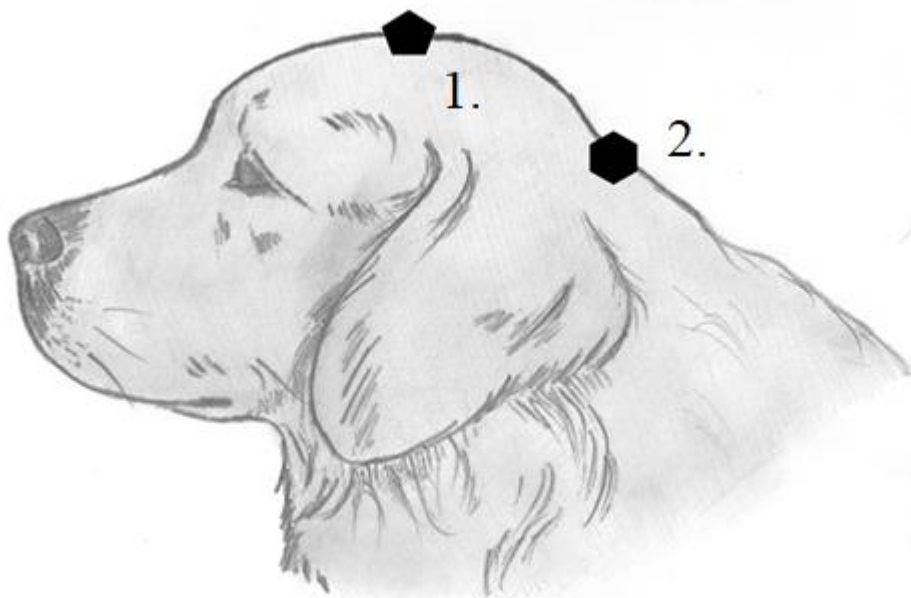

ПОЖИЛАЯ СОБАКА

В целях профилактики и нормализации состояния собаки, 1-2 раза в неделю, 1 раз в день, по 5 минут на каждую точку:


1. в ямку под затылочной костью;
2. между лопаток на область 4 грудного позвонка;
3. под коленом на большеберцовую кость;
4. на запястную подушечку.

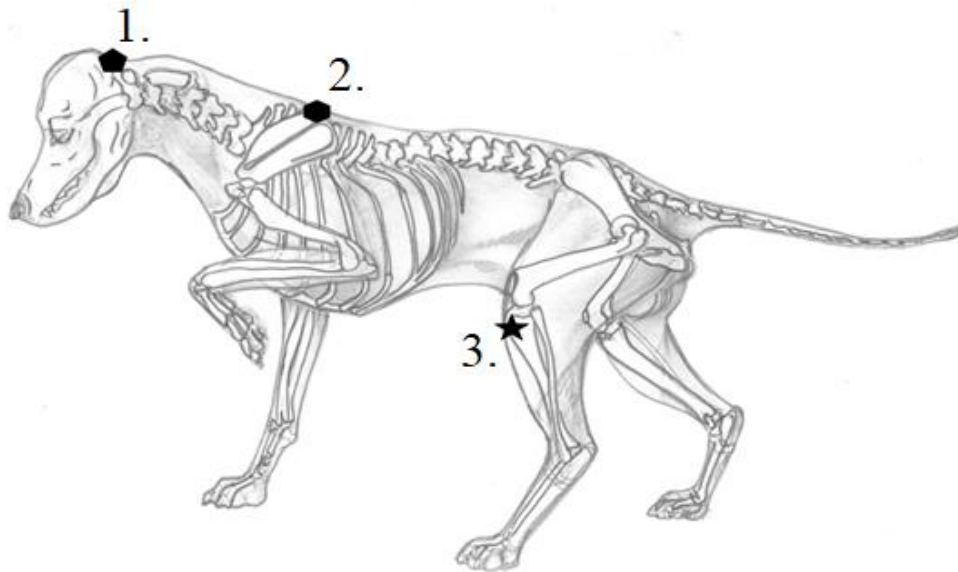

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

В комплексе с поддерживающей и восстановительной терапией, в течение всего лечения, курсами по 10 дней, ежедневно, по 5-10 минут на каждую точку:


1. на запястную подушечку;
2. в центре грудины (на линии, проведенной подмышками);
3. на свободном крае 12 ребра справа;
4. на пупке.

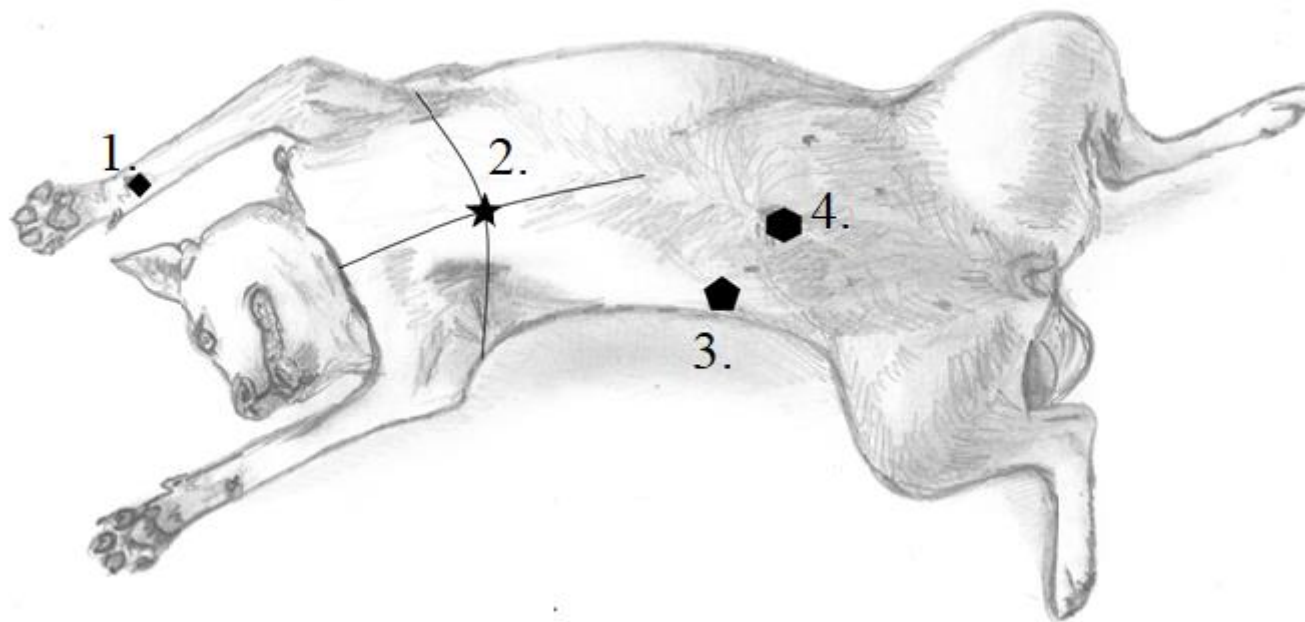

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ НАРКОЗА

Для восстановления функций, в первые сутки после наркоза, 2 процедуры с разницей 2-3 часа, по 5-7 минут на каждую точку:

1. в ямку под затылочной костью;
2. на большеберцовой кости (чуть выше голеностопного сустава с внутренней стороны);
3. под коленом на большеберцовую кость;
4. на макушку (самая верхняя точка черепа);
5. под носом.

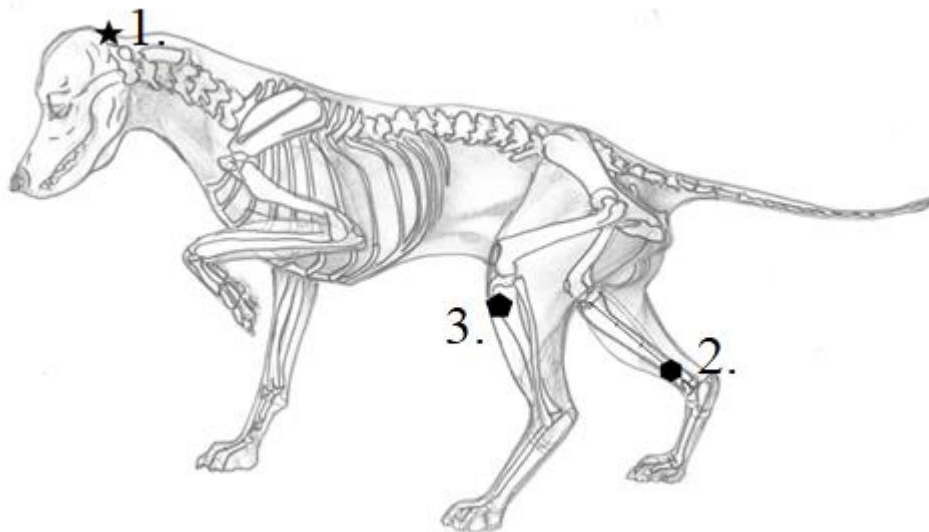


МОЛЕРА ИЛИ РОДНИЧОК

У собак породы чихуахуа и других экстремально миниатюрных собак.

Для профилактики гидроцефалии, в течении 2-х недель, ежедневно, 1 раз в день, по 5 минут на каждую точку:

1. На область молеры;
2. По центру грудины (на линии, проведенной подмышками);
3. В ямку под затылочной костью;
4. Под коленом на большеберцовую кость.

Курсы лечения повторять до 3-х летнего возраста, не реже двух раз в год.

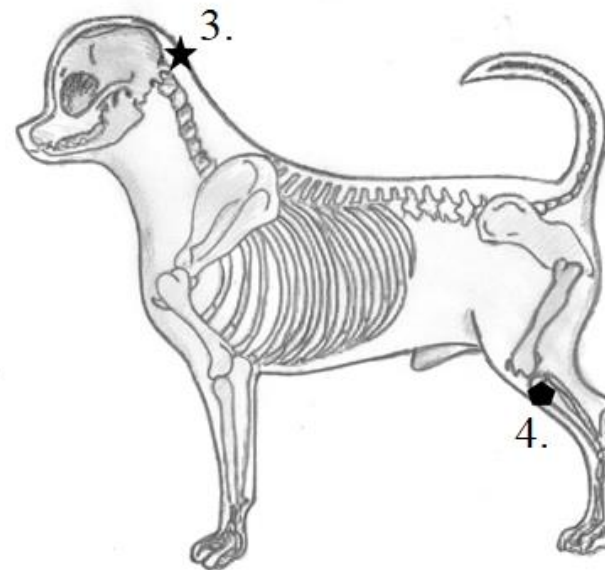


ТРАВМА (ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РАНЫ, ПЕРЕЛОМЫ, УШИБЫ, ГЕМАТОМЫ)

Лечение желательно начать сразу после проведения неотложных мероприятий (остановки кровотечения, иммобилизации перелома, ушивание большой кожной раны и т.д.). Излучатель аппарата ставится перпендикулярно плоскости тела (конечности), непосредственно на травмированный участок (можно через сухую повязку (гипсовую, бинтовую) и при наличии шин, имплантов, штифтов) или в 3-5 мм от поверхности открытой/ушитой раны. Лечение проводят местно, , начиная с острого периода (3-7 дней) и далее в течение всего лечения и реабилитации, ежедневно, 2-3 раза в сутки, на область раны (перелома) в течении 15 минут.



АРТРОЗЫ И АРТРИТЫ

Лечение длительное. В острой стадии проводить лечение ежедневно, 2 раза в день: утром и вечером. Излучатель аппарата ставится произвольно в проекции пораженного сустава на 10 минут. Если поражены несколько суставов, то лечим их поочередно. Продолжительность процедуры может составлять от 30 минут до 1 часа.

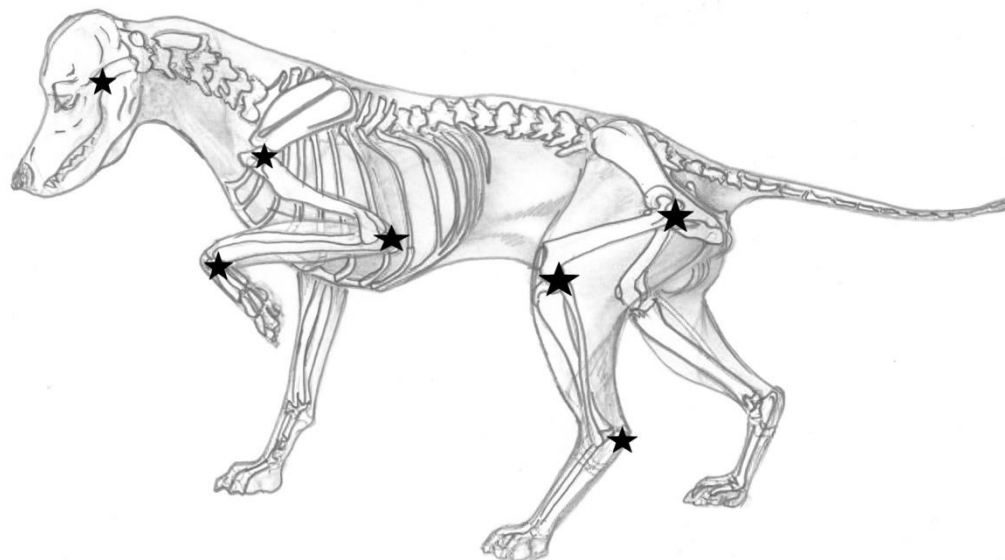


БОЛЕЗНИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ЛОР-ОРГАНОВ

РИНИТ

Симптомы насморка у собак чем-то схожи с человеческими проявлениями заболевания. Так, при рините, животное начинает часто чихать, облизывать нос и тереть его лапами. Процедуру в острой фазе проводить не менее 10 дней, ежедневно, 2-3 раза в день, по 5 минут на каждую точку:



1. на макушку (самая верхняя точка черепа);
2. в ямку под затылочной костью;
3. по обе стороны середины морды (в проекции носового хода).

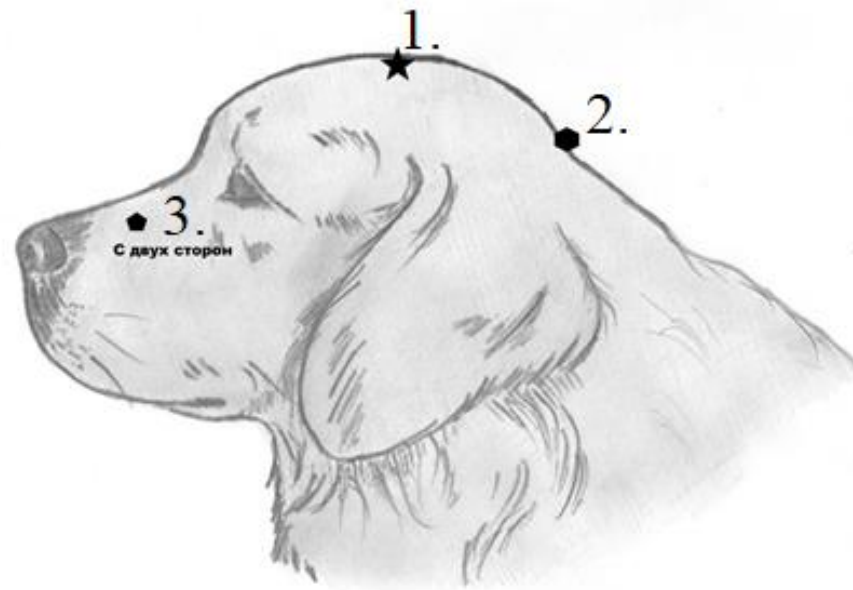

ОТИТ

Симптомы отита у собаки могут быть разнообразными, степень и форма их выраженности зависит от вида болезни, иммунитета, индивидуальных особенностей питомца, запущенности процесса. Владельцу следует обратиться в ветеринарную клинику. Воздействие аппаратом снимет отёк и уменьшит воспалительные явления. Процедуру в острой фазе проводить не менее 10 дней, ежедневно, 2-3 раза в день, по 5 минут на каждую точку, далее ежедневно до исчезновения симптомов:



1. на макушку (самая верхняя точка черепа);
2. верхнее основание ушной раковины;
3. у входа в слуховой канал;
4. нижнее основание ушной раковины.

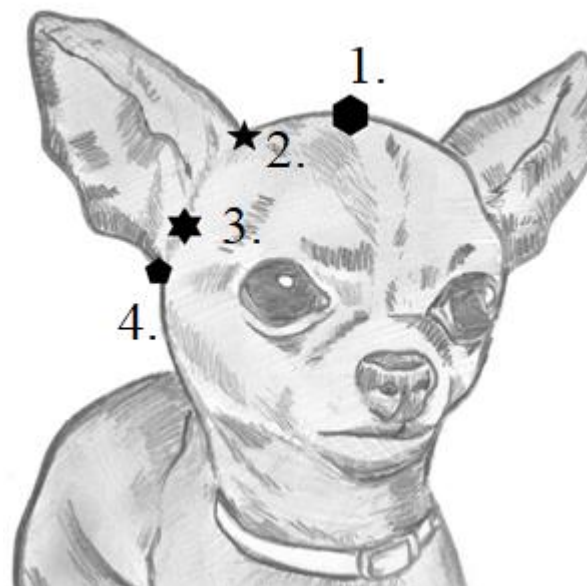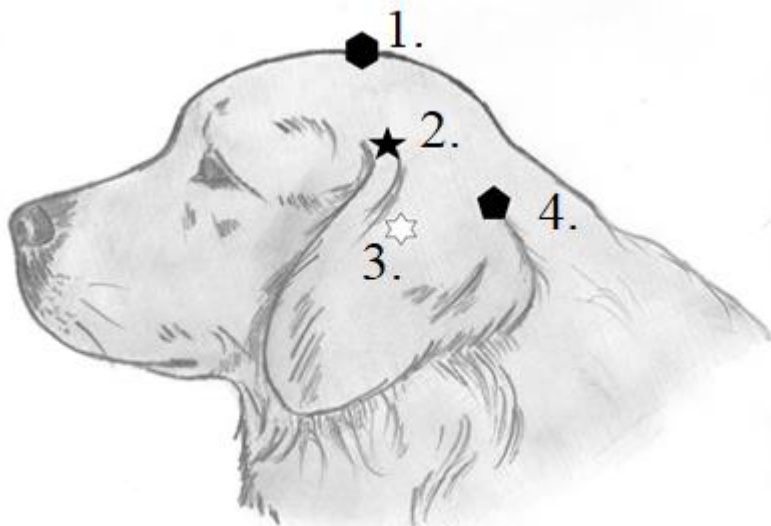

ФАРИНГИТ, ЛАРИНГОТРАХЕИТ

Заболевание, как правило, вирусного происхождения, сопровождается кашлем с рвотными позывами. Процедуру в первые трое суток повторять 2 раза в день, по 15 минут на каждую точку. Далее - 1 раз в день, по 15 минут на каждую точку, до полного исчезновения симптомов. Всего не менее 10 дней. Точки для терапии:


1. на макушку (самая верхняя точка черепа);
2. над первым грудным позвонком (самая выступающая часть холки);
3. над яремной впадиной грудины;
4. над дополнительным пальцем передней лапы.

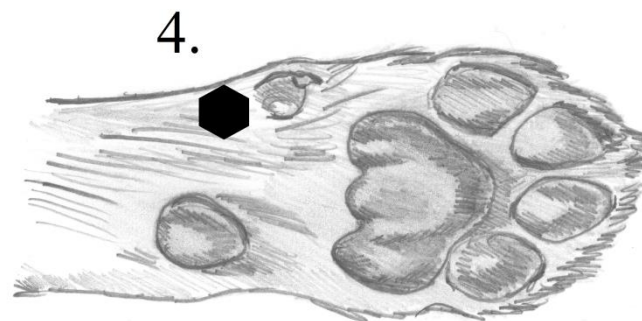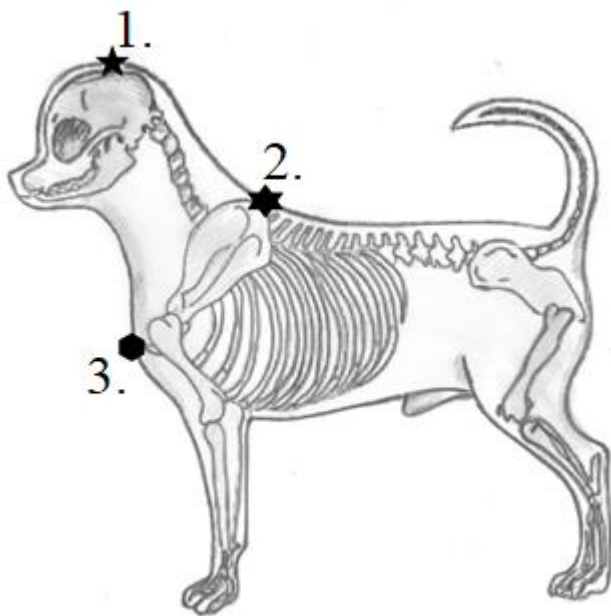

БРОНХОПНЕВМОНИЯ

Лечение комбинированное, с применением антибиотиков, в течении 14 дней. В первые трое суток процедуру проводить 2 раза в сутки, по 5 минут на каждую точку. Далее - 1 раз в день, по 15 минут на каждую зону, до полного исчезновения симптомов:



1. над дополнительным пальцем передней лапы;
2. под ключицей, в ямке у плеча с двух сторон;
3. по центру грудины (на линии проведенной подмышками);
4. на пупок.

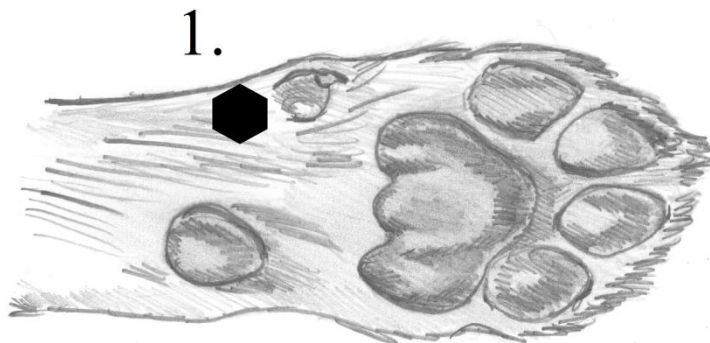

ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ, ХОБЛ

Лечение длительное, как правило, пожизненное, курсами: 3-6 раз в год, по 10 ежедневных процедур, по 15 минут на каждую зону:

1. над дополнительным пальцем передней лапы;
2. под ключицей, в ямке у плеча с двух сторон;
3. по центру грудины (на линии проведенной подмышками).

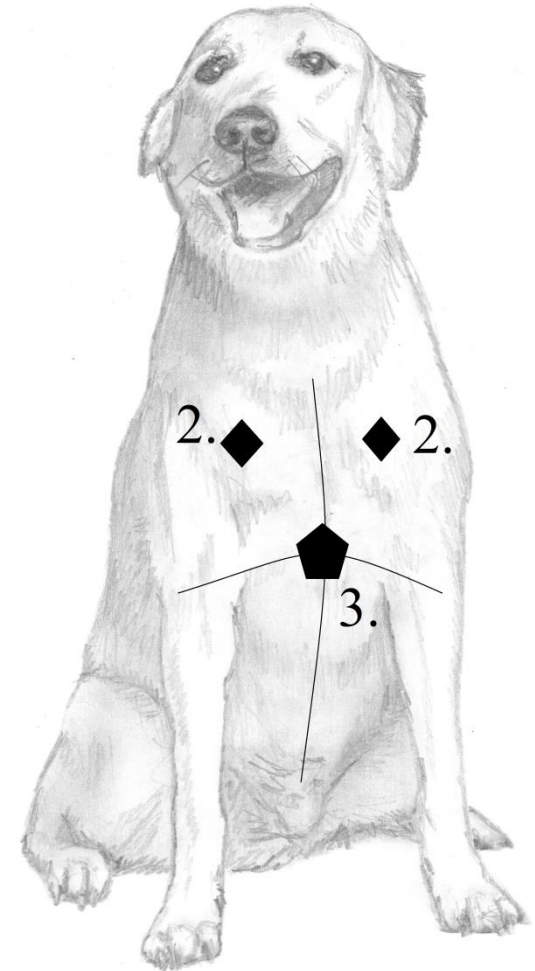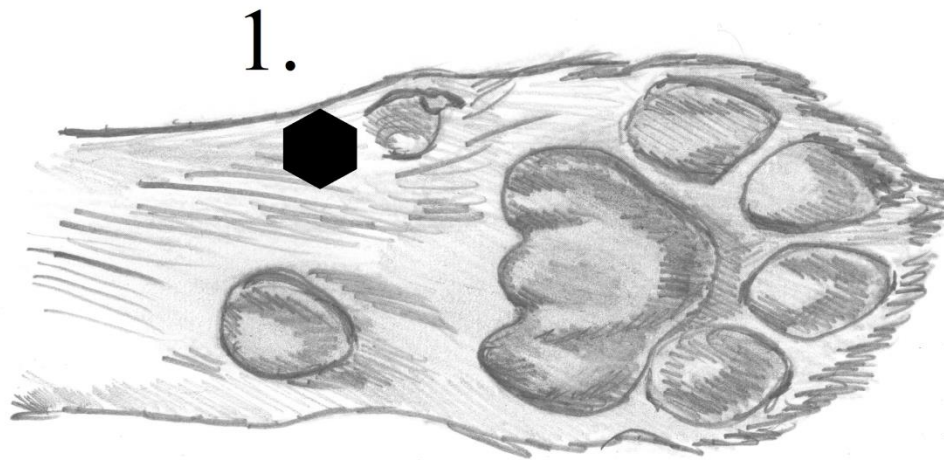




Болезни сердечно-сосудистой системы

МИОКАРДОЗ, ПЕРИКАРДИТ, МИОКАРДИТ, ЭНДОКАРДИТ, ИНФАРКТ МИОКАРДА

Лечение длительное, с обязательной медикаментозной поддержкой и под наблюдением ветеринара.

В острой фазе заболевания, первые 2 недели, ежедневно, по 2 раза в день, по 5-10 минут на каждую зону. Далее - 1 раз в день, по 5 минут на каждую точку, до полного исчезновения симптомов:



1. на передней лапе, на середине лучезапястной складки у подушечки;
2. по центру грудины (на линии проведенной подмышками);
3. под левой подмышкой в четвертом межреберье;
4. в ямку под затылочной костью;
5. нижнее основание ушной раковины.

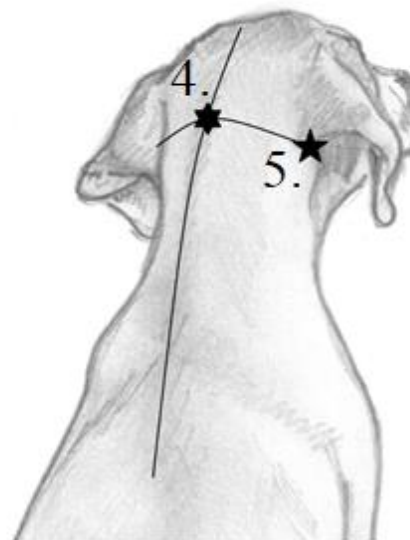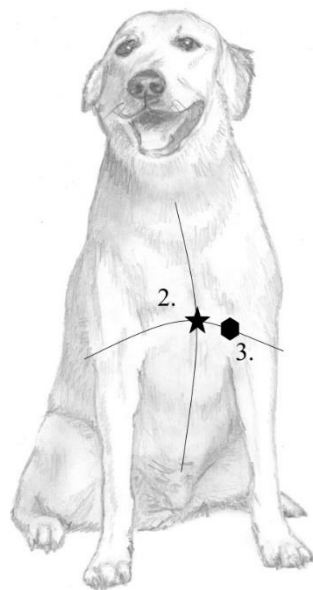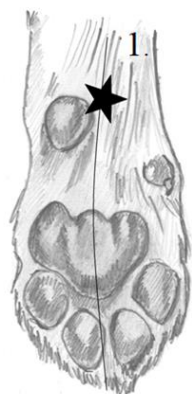

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Лечение курсами: каждые два месяца, по 10 дней, ежедневно, по 5-7 минут на каждую зону:


1. на передней лапе, по середине лучезапястной складки у подушечки;
2. по центру грудины (на линии проведенной подмышками);
3. под левой подмышкой в четвертом межреберье.

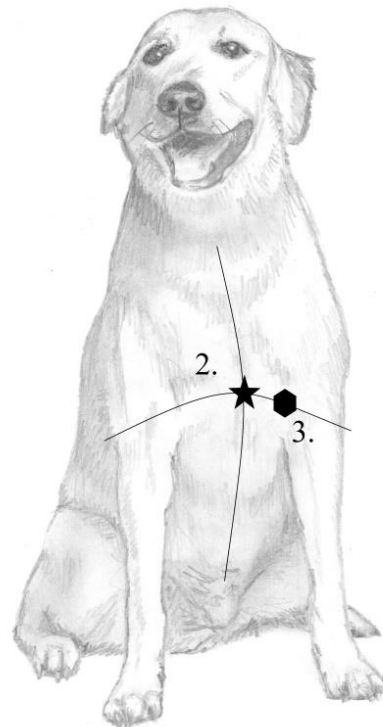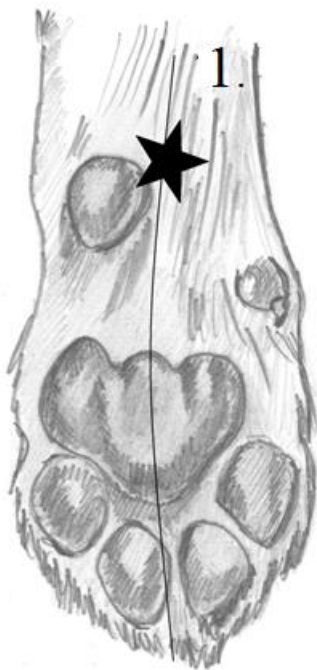

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У СОБАК (МИОКАРДОЗ, ДИАБЕТ, ОЖИРЕНИЕ)

Лечение длительное, часто пожизненное, для профилактики осложнений, 2-3 раза в неделю, 1 раз в день, по 5-7 минут на каждую зону:

1. в область пупка;
2. по центру грудины (на линии проведенной подмышками);
3. по середине лучезапястной складки передней лапы.

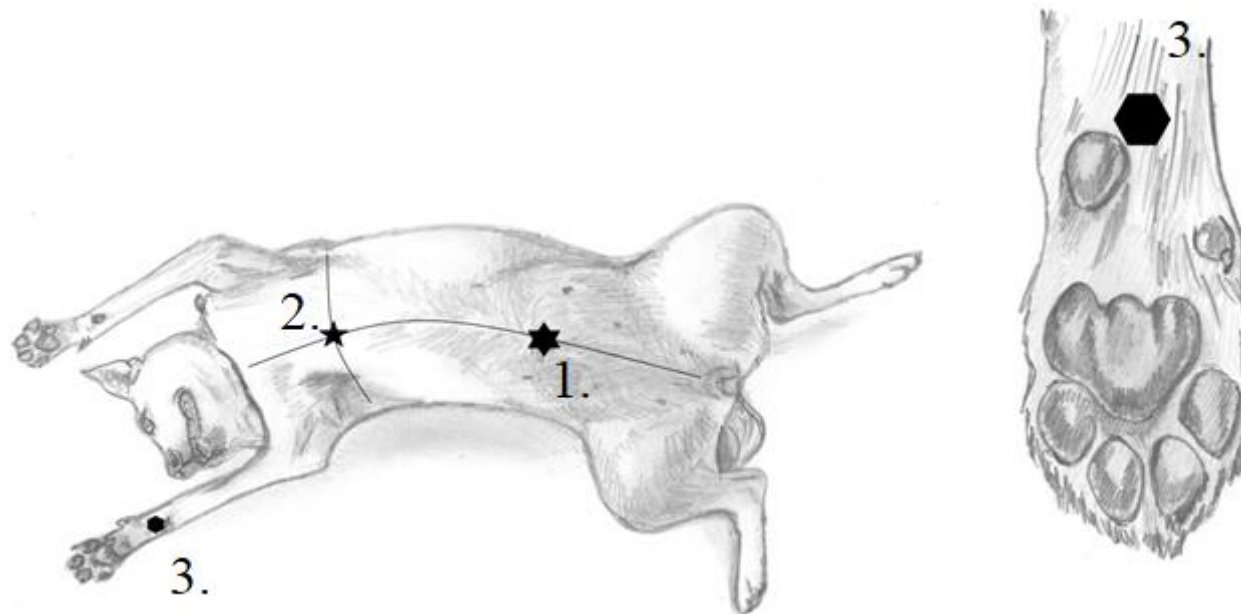


НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ

Воспаление головного мозга и его оболочек. Заболевание протекает с глубокими нарушениями функции коры головного мозга и подкорковых центров. Параллельно назначенному лечению невролога, для облегчения симптомов, воздействовать на указанные точки, в течении 2-3 недель, ежедневно, 1 раз в день, по 5-10 минут на каждую зону:


1. на макушку;
2. верхнее основание ушной раковины;
3. в ямку под затылочной костью;
4. по середине лучезапястной складки передней лапы.

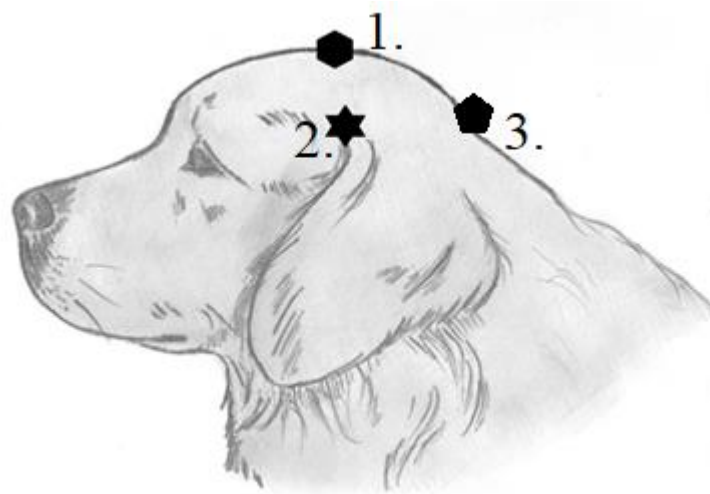

ГРЫЖА ПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ (HANSEN ТИП 1, ПО ДАННЫМ МРТ - DISK EXTRUSION)

Это – тип «грыжи», который характеризуется истинным разрывом фиброзного кольца. Наиболее часто образуется в конце грудного и начале поясничного отделов. Важно помнить, что основным лечебным мероприятием для этих пациентов следует считать обездвиживание (клеточное содержание): собака должна находиться в клетке 2 недели.

Аппарат может быть использован как монотерапия, если известна точная локализация грыжи. Излучатель ставится на проекцию поврежденного сегмента позвоночника, лечение не менее 3 недель, ежедневно, 1 раз в день, по 20 минут.

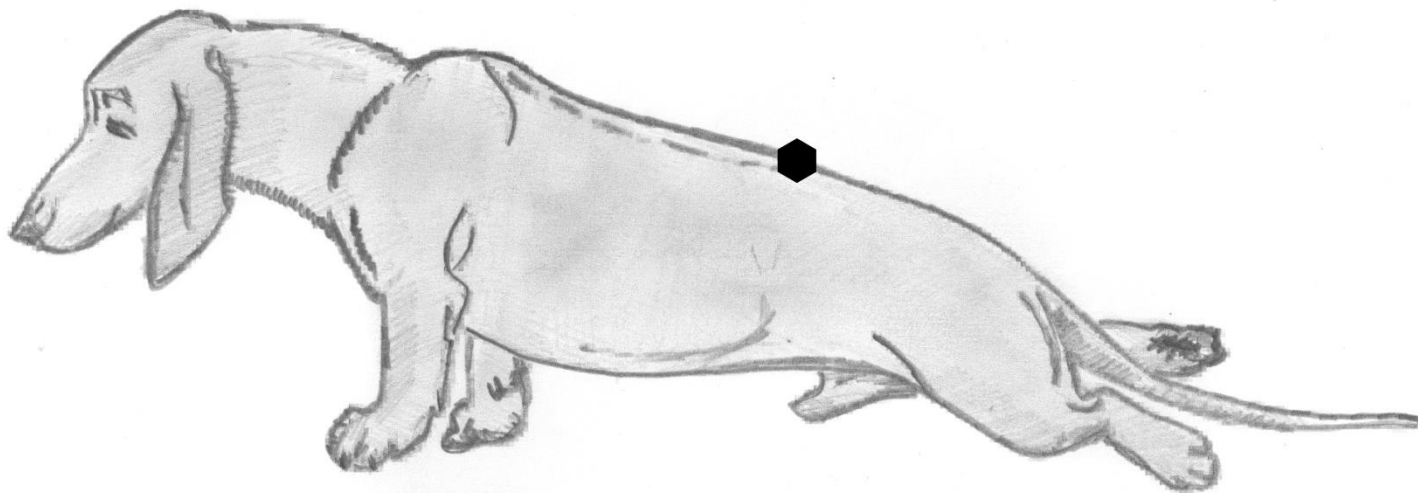


ПАРЕЗЫ И ПАРАЛИЧИ

ПАРАЛИЧ ГЛОТКИ

Лечение длительное, в течении 4-7 недель, ежедневно, 1 раз в день, на каждую зону по 10 минут:


1. на макушку (самая верхняя точка черепа);
2. в ямку под затылочной костью;
3. над щитовидны хрящом гортани.

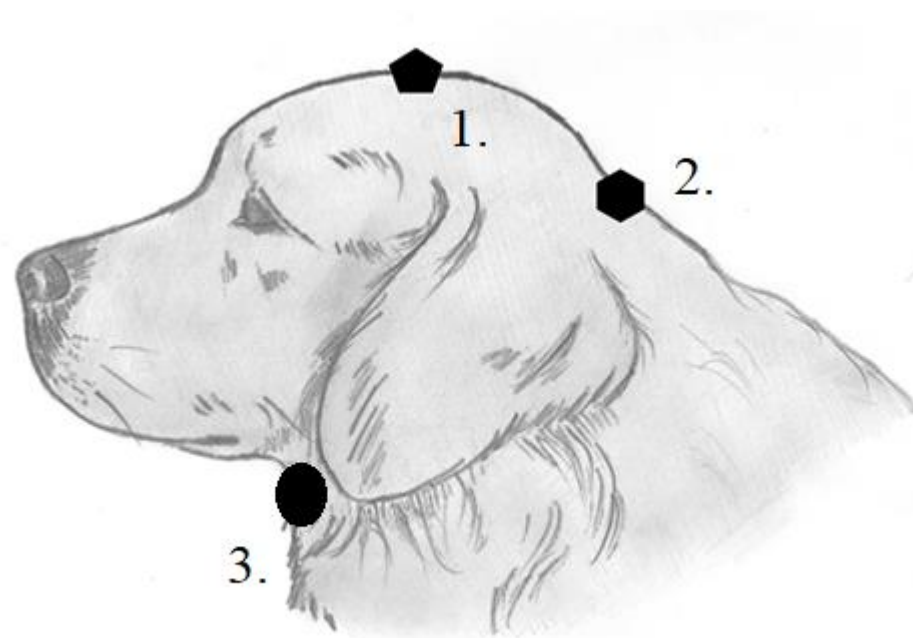

ПАРАЛИЧ ПЕРЕДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Лечение длительное, в течении 4-7 недель, ежедневно, 1 раз в день, на каждую зону по 10 минут:


1. в ямку под затылочной костью;
2. под седьмым шейным позвонком.

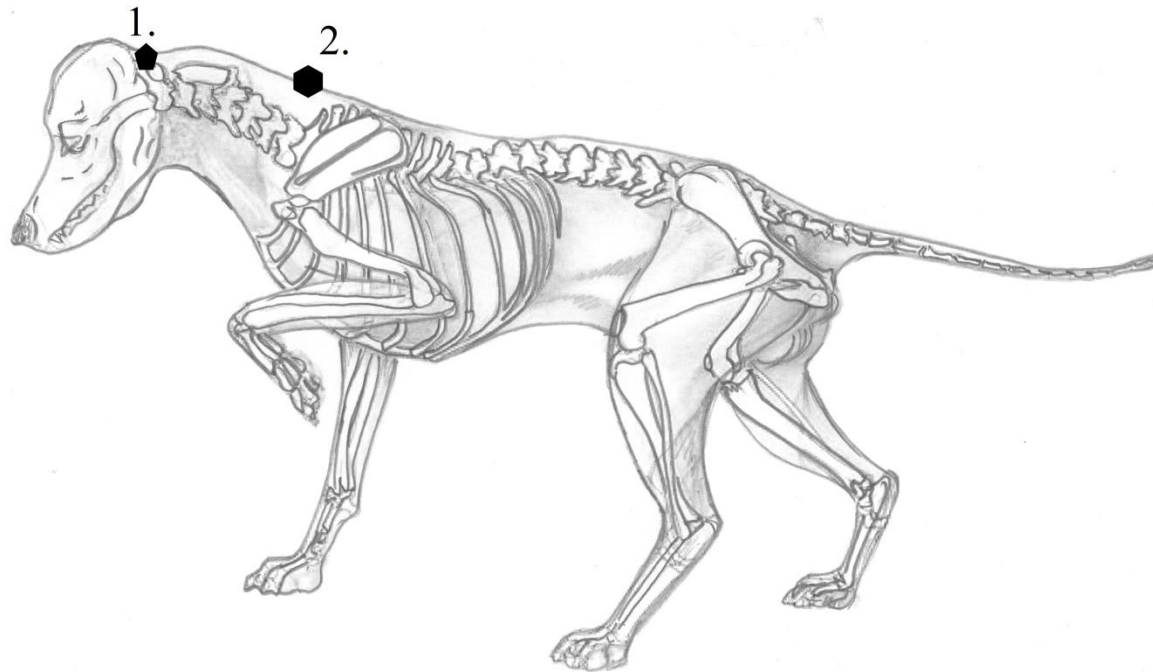

ПАРАЛИЧ ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Лечение длительное, в течении 4-7 недель, ежедневно, 1 раз в день, на каждую зону по 10 минут


1. между тринадцатым грудным и первым поясничным позвонком;
2. между седьмым поясничным и первым крестцовым позвонком;
3. под коленом на большой берцовой кости.

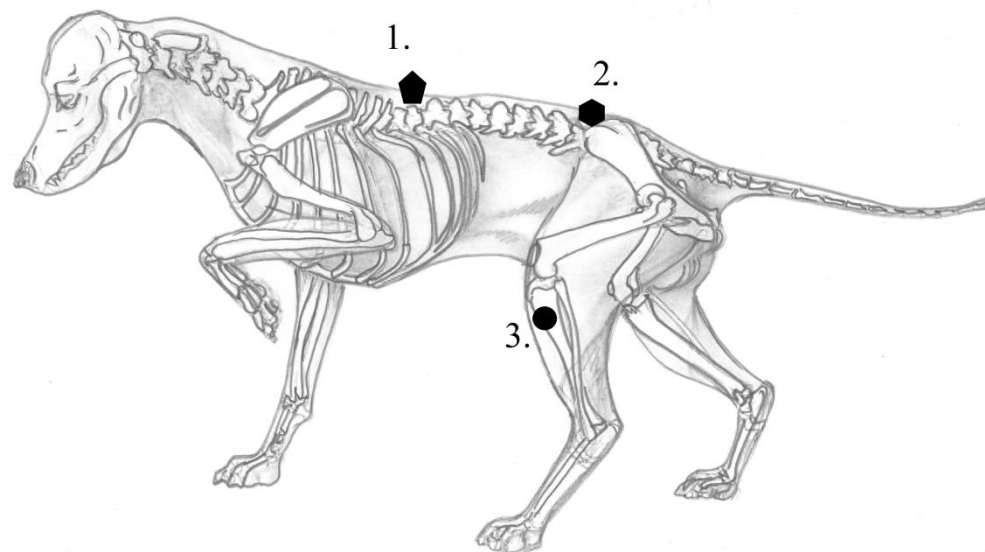

ПАРАЛИЧ МЫШЦ МОРДЫ

Лечение длительное, в течении 4-7 недель, ежедневно, 1 раз в день, на каждую зону по 10 минут

1. верхнее основание ушной раковины;
2. над скуловой костью;
3. над клыковой мышцей.


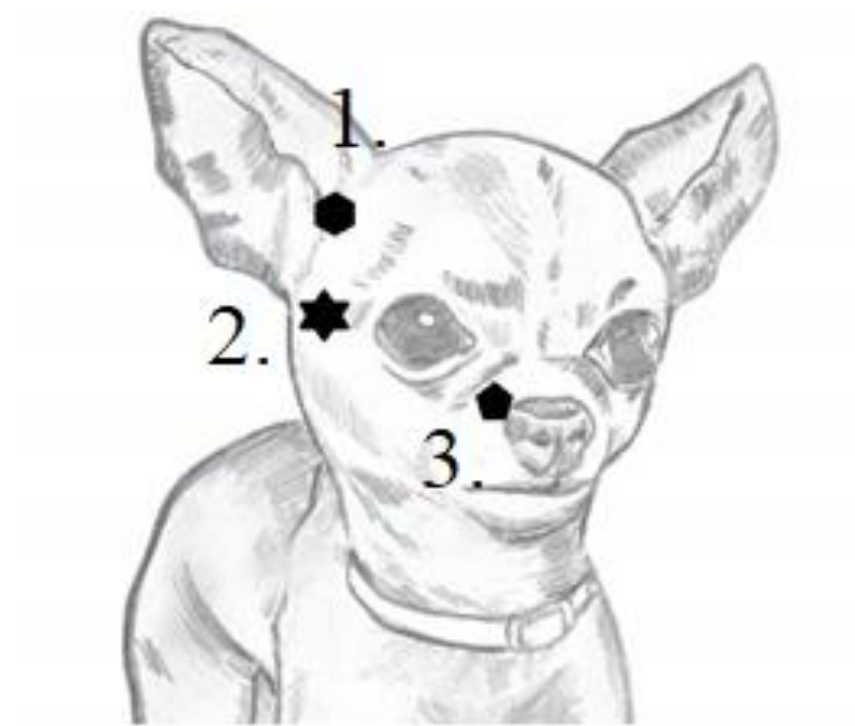


Неврозы

ВОЗБУЖДЕНИЕ

Лечение длительное, в течении 2-3месяцев, через день, 1 раз в день, по 10 минут на зону:


1. по центру грудины (на линии проведенной подмышками);
2. в ямку под затылочной костью;
3. под коленом на большой берцовой кости.

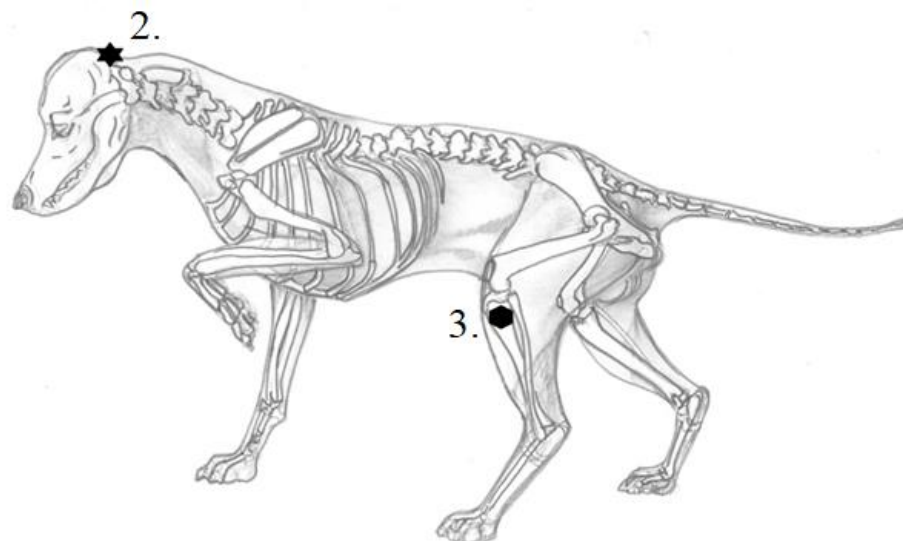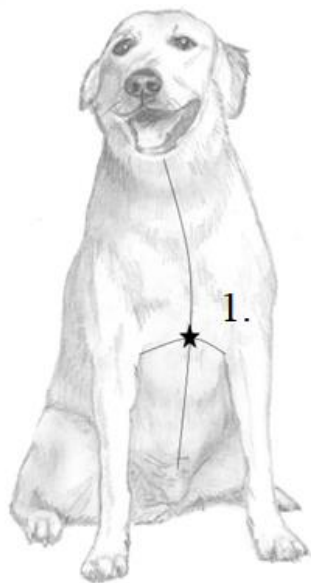

ТОРМОЖЕНИЕ

Лечение длительное, в течении 2-3месяцев, через день, 1 раз в день, по 10 минут на зону:

1. на макушку;
2. на пупок;
3. чуть выше внутреннего мыщелка большеберцовой кости с двух сторон.

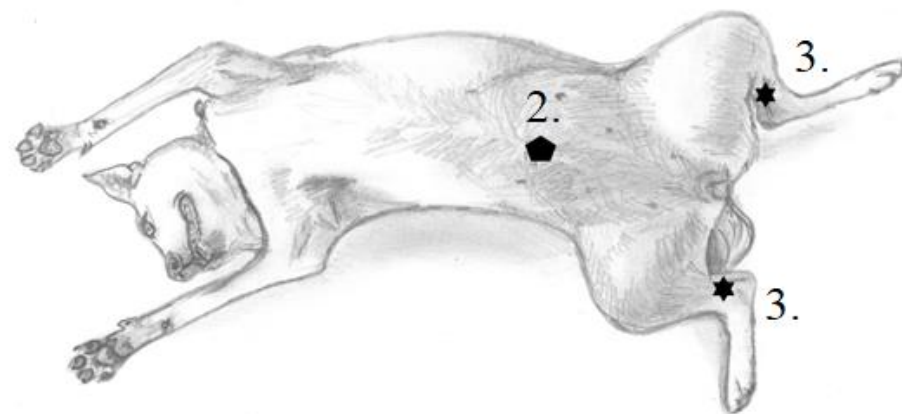


КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ

ДЕРМАТОЗ, ДЕРМАТИТ, АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ

Основной клинической картиной являются всевозможные поражения кожных покровов. Дерматиты имеют паразитарное, инфекционное, воспалительное или наследственное происхождение. Ввиду разнообразия причин лечение комплексное, должно проводиться в соответствии с поставленным диагнозом.

Для облегчения зуда и беспокойства – в течении 7-14 дней, ежедневно, 1 раз в день, по 5 минут на каждую точку. Возможно и местное лечение на область поражения - 15 минут, медленно передвигая излучатель аппарата по области поражения, до полной её обработки.

1. под затылочной костью;
2. на локтевом сгибе;
3. на свободном 12 ребре справа;
4. под коленом на большеберцовой кости.

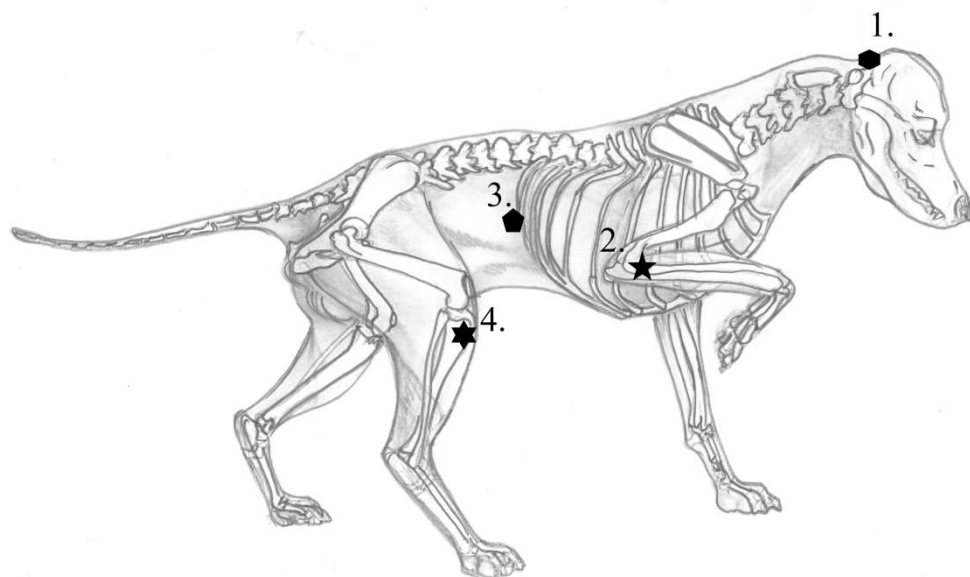

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

Перед воздействием аппаратом на область глаз, для избегания светового дискомфорта от попадания света в глаза, излучатель аппарата нужно отделить от глаза светонепроницаемой сухой тканью, толщиной не более 1-3 мм (переднюю часть корпуса аппарата можно поместить, например, в «глухой» светонепроницаемый чехол от складного зонтика).

КОНЬЮНКТИВИТ, БЛЕФАРИТ ЯЗВЕННЫЙ КЕРАТИТ, УВЕИТ

Лечение местное, в течение 10 дней, ежедневно, 1 раз в день, на закрытое веко и на каждую точку по 5 минут:


1. на внутренний угол глаза;
2. на верхнее основание носа;
3. местно на веко (глаз закрыт).



ВЫВИХ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

Лечение не менее 15-20 дней, ежедневно, в острый период, в течении 3-5 дней, по 3 процедуры (утром, днем и вечером), далее, 1 раз в день, на ночь 2 недели. На каждую точку по 5 минут:


1. на макушку;
2. на наружный угол глаза;
3. на нижний край глазницы;
4. местно на веко (глаз закрыт).

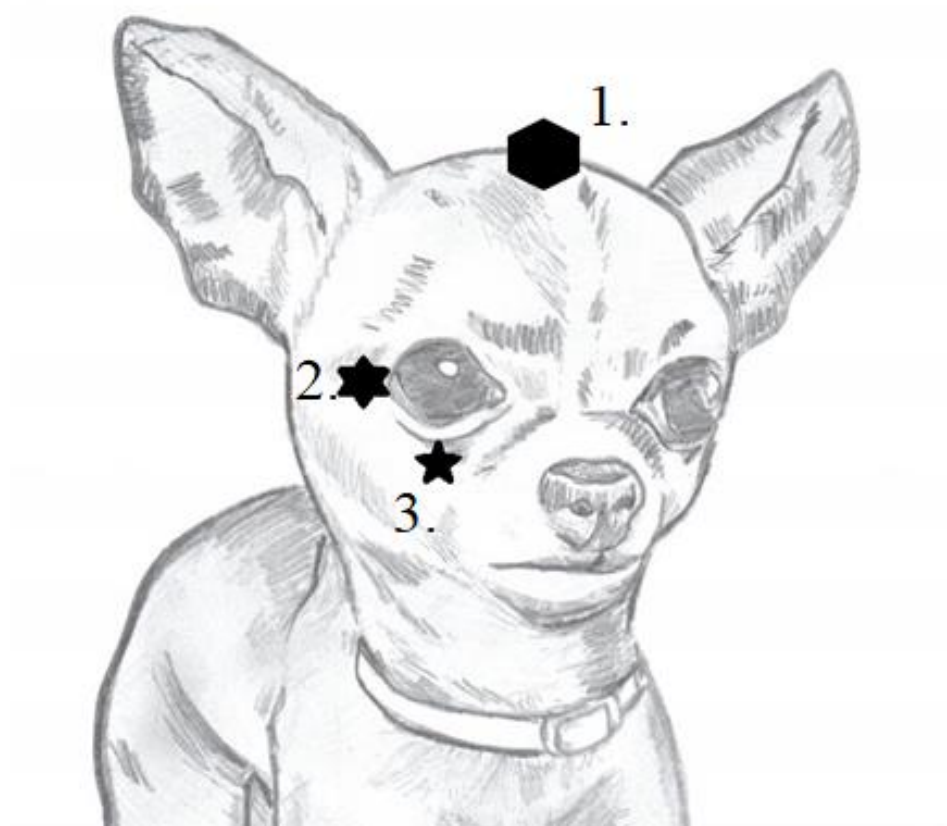

ОТСЛОЕНИЕ И АТРОФИЯ СЕТЧАТКИ

Лечение длительное. В острый период, в течении недели, ежедневно, 2 раза в день, далее курсами для профилактики по 10 дней каждые 3-4 месяца в течении всей жизни. На каждую зону по 5 минут:


1. на макушку;
2. под затылочной костью, в ямке;
3. на наружный угол глаза с двух сторон.

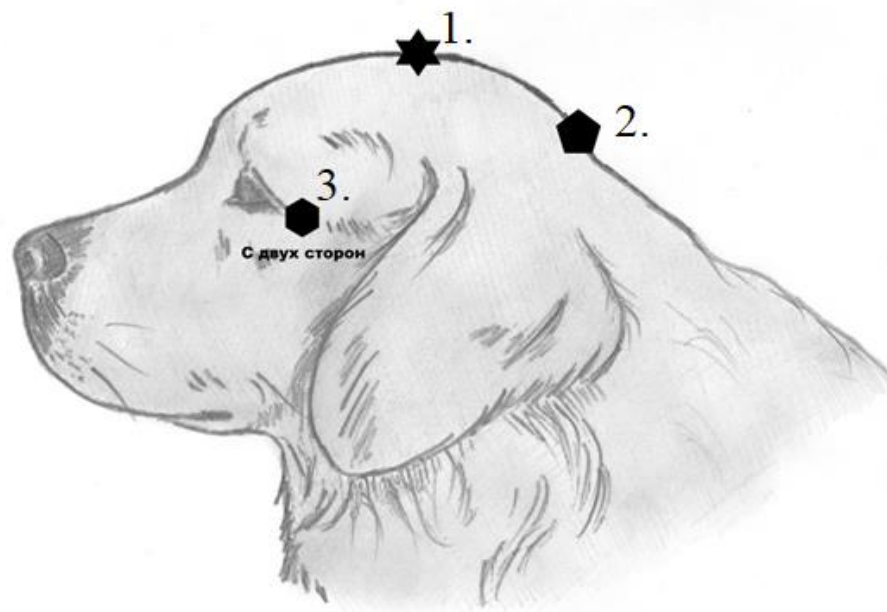

ГЛАУКОМА

Лечение длительное. В острый период, в течении недели, ежедневно, 2 раза в день, далее курсами для профилактики по 10 дней каждые 3-4 месяца в течении всей жизни. На каждую зону по 5 минут:

1. На внутренний край глаза с двух сторон;
2. На нижний край глазницы с двух сторон;
3. На наружный край глазницы с двух сторон.

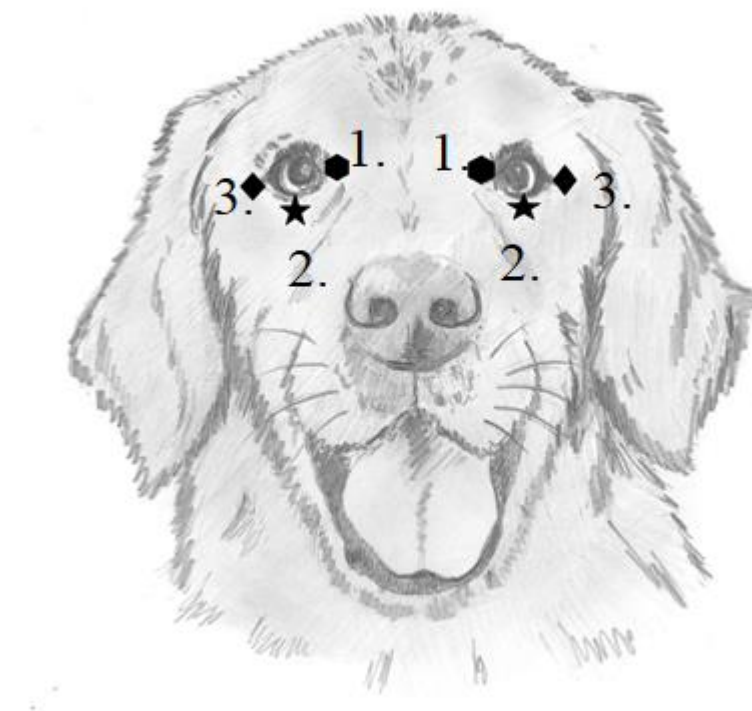


ЗАБОЛЕВАНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

ДИАБЕТ


I ТИП – возникает при нарушении способности поджелудочной железы вырабатывать достаточное количество инсулина. Требуется введение дополнительного инсулина. Лечение длительное, пожизненное, для профилактики осложнений: 2-3 раза в неделю, 1 раз в день, на зоны по 5-7 минут:

1. на передней лапе, по середине лучезапястной складки у подушечки;
2. по центру грудины (на линии проведенной подмышками);
3. на пупке;
4. на свободный край 12 ребра слева;
5. чуть выше внутреннего мыщелка большеберцовой кости.

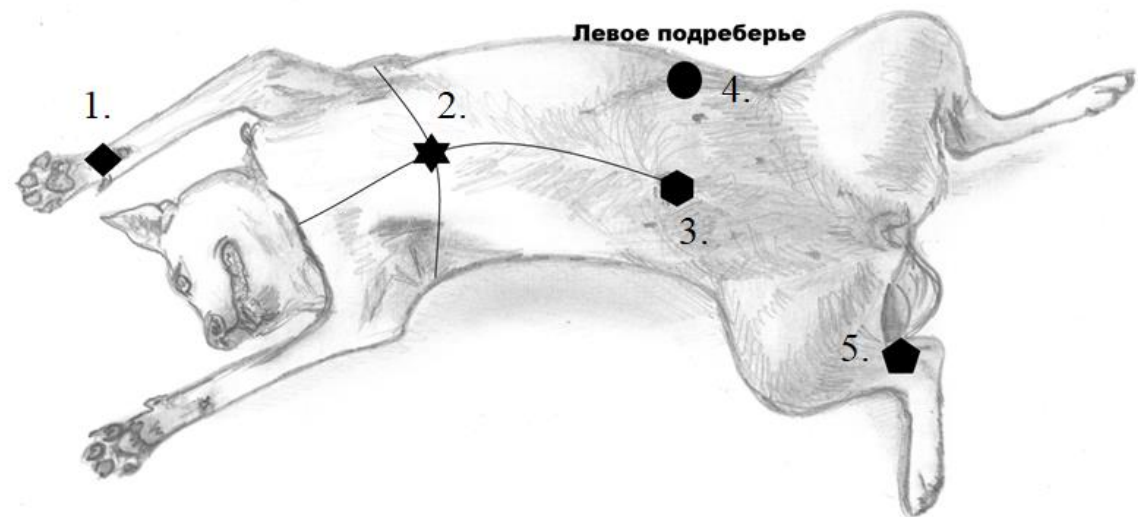


II ТИП – возникает при нарушении реакции клеток организма на инсулин, что ослабляет взаимодействие с глюкозой. Лечение длительное, для профилактики осложнений - 2-3 раза в неделю, 1 раз в день, на зоны по 5-7 минут на зоны:

1. на передней лапе, по середине лучезапястной складки у подушечки;
2. по центру грудины (на линии проведенной подмышками);
3. на пупке.

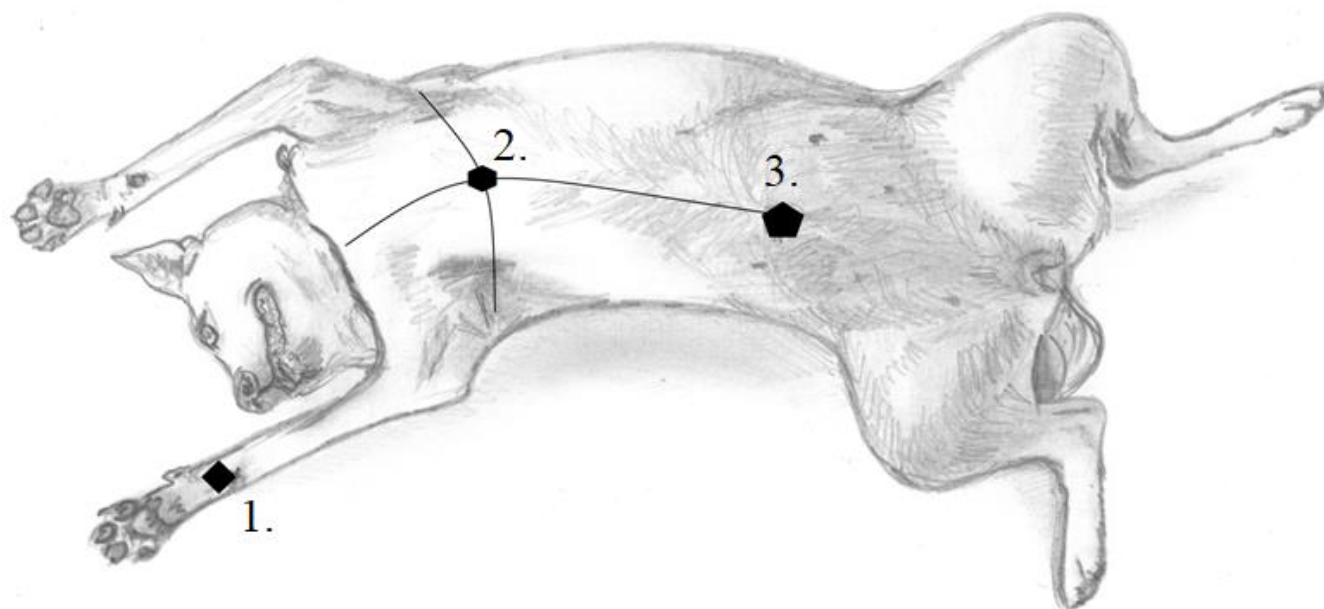

III ТИП – вторичный, проявляющийся вследствие других заболеваний, при длительном лечении гормональными препаратами или отравлении. Лечение для профилактики осложнений в течении 3-4 недель, ежедневно, 1 раз в день, по 5 минут на каждую зону:


1. по центру грудины (на линии проведенной подмышками);
2. на свободный край 12 ребра слева;
3. чуть выше внутреннего мыщелка большеберцовой кости.

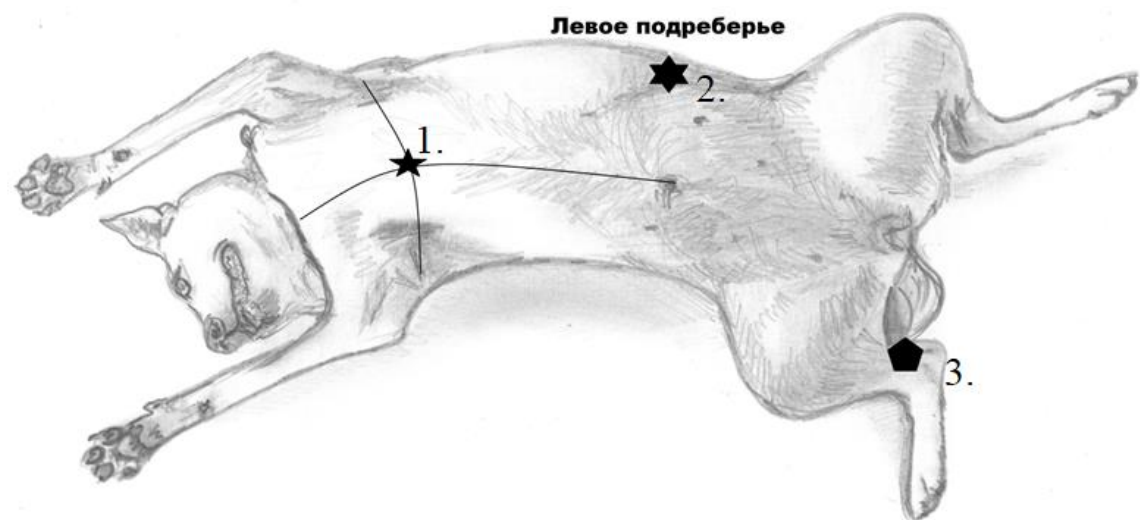

ГЕСТАЦИОННЫЙ ТИП – возникает у щенных сук и может носить временный характер.

Лечение для профилактики осложнений в течении 2-3 недель, ежедневно, 1 раз в день, по 10 минут на каждую зону:


1. на пупке;
2. на свободный край 12 ребра слева.

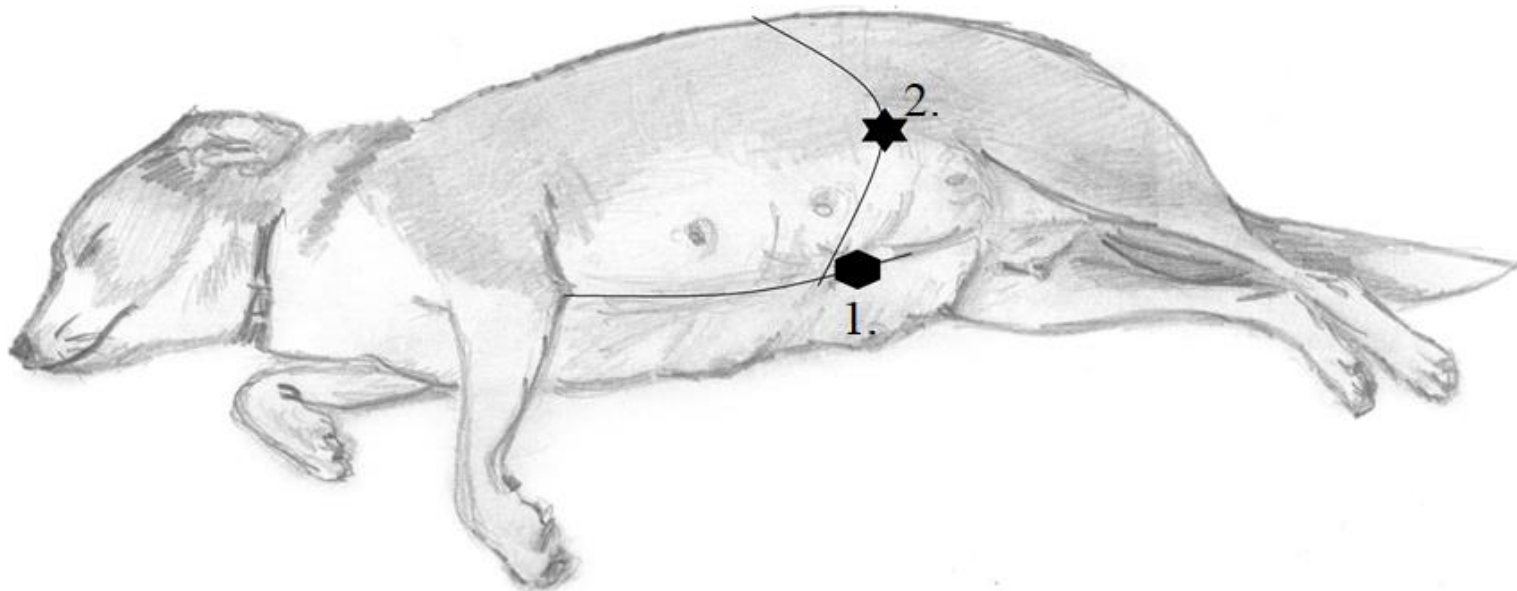

ГИПОТИРЕОЗ

Лечение первичной формы гипотиреоза, самого распространенного, проводят с применением препарата гормона щитовидной железы. Терапия будет назначена пожизненно. Терапия аппаратом длительная, курсами каждые 3 месяца по 10 дней, ежедневно, 1 раз в день, по 5 минут на зону:

1. на макушку;
2. по обе стороны от щитовидного хряща;
3. по центру грудины (на линии проведенной подмышками).


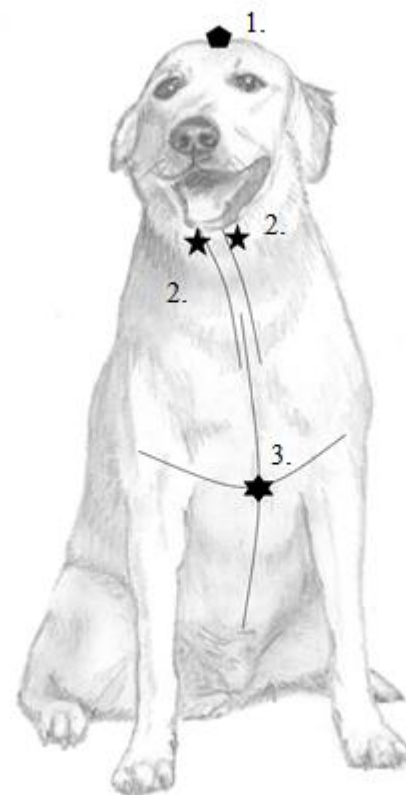


БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

ГАСТРОЭНТЕРИТ

Болезнь является патологическим состоянием, проявляющимся через воспаление слизистой кишечника и желудка. При переходе воспалительного процесса в толстый кишечник диагностируют гастроэнтероколит. В запущенной стадии деформируется мышечный слой, что чревато сбоями в работе пищеварительной системы и появлением секреторной дисфункции. В острый период лечение проводится не менее 5-7 дней, ежедневно, 2-3 раза в день, далее ежедневно, 1 раз в день, до полного исчезновения симптомов (10-14 дней). Процедуры - по 5 минут на зону:



1. на холку в области 2-3 грудного позвонка;
2. под коленом на большеберцовой кости;
3. под мечевидным отростком грудины, область эпигастрия;
4. на пупок.

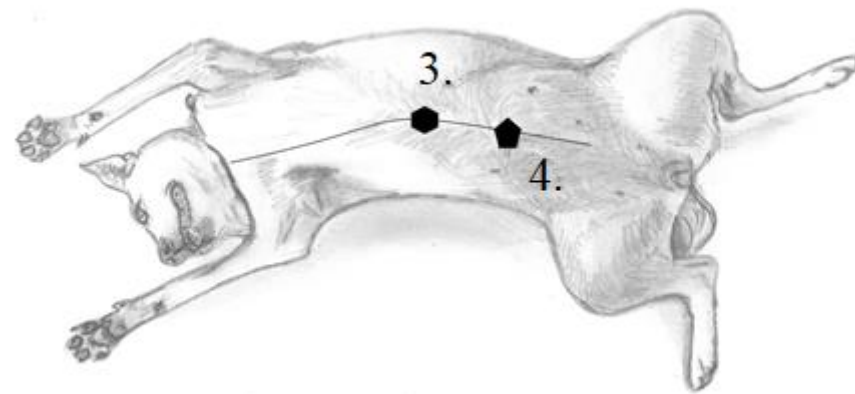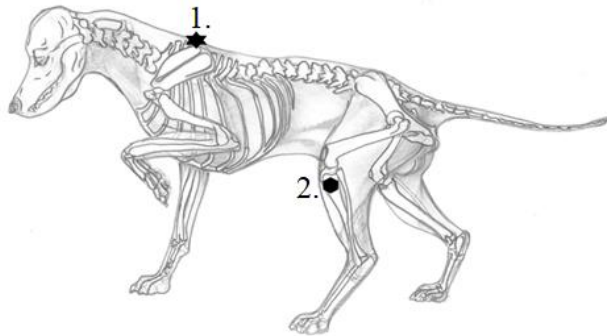

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

Лечение язвенного заболевания направлено, прежде всего, на борьбу с первопричиной патологии. Также важно при помощи лекарственной терапии подавить секреторную функцию желудка, понизив, тем самым, количество желудочной кислоты, и устранить кровотечение. В острый период лечение проводится 5-7 дней, ежедневно, по 2-3 раза в день, далее ежедневно, 1 раз в день, до полного исчезновения симптомов (10-14 дней) по 5 минут на зону:



1. на холку в области 2-3 грудного позвонка;
2. под коленом на большеберцовой кости;
3. по центру грудины (на линии проведенной подмышками);
4. под мечевидным отростком грудины, область эпигастрия.

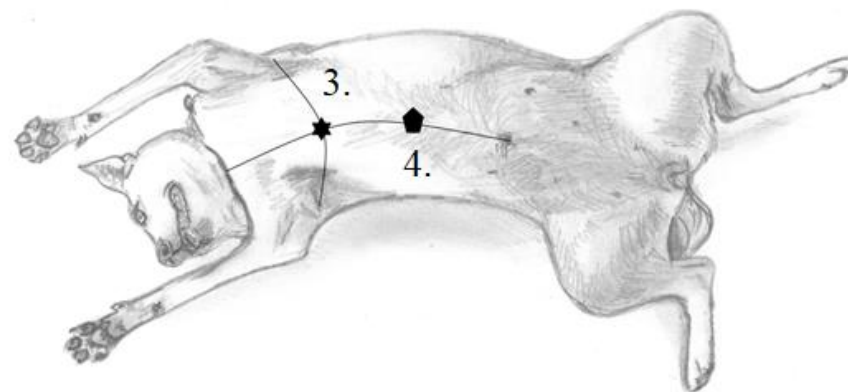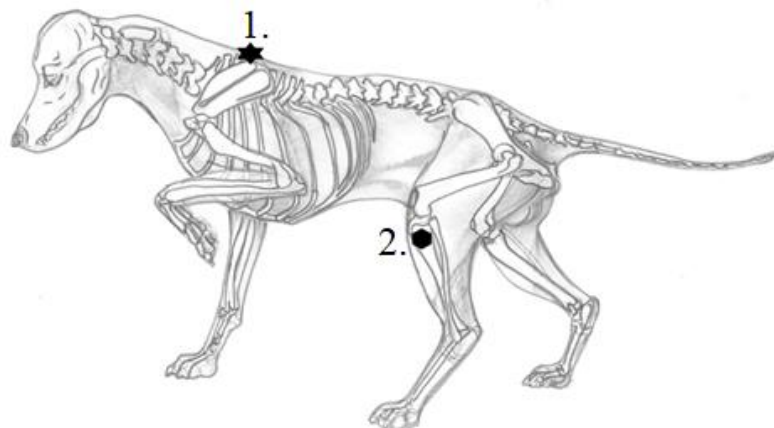

КОЛИТ

Воспаление слизистой толстого кишечника. В острый период, 5-7 дней, лечение проводится ежедневно, 2-3 раза в день, далее ежедневно, 1 раз в день, до полного исчезновения симптомов (10-14 дней) по 5 минут на зону:


1. на пупок;
2. на середину паховой складки слева;
3. на область между остистыми отростками 12-13 грудных позвонков;
4. на область между остистыми отростками 6-7 поясничных позвонков
5. под коленом на большеберцовой кости.

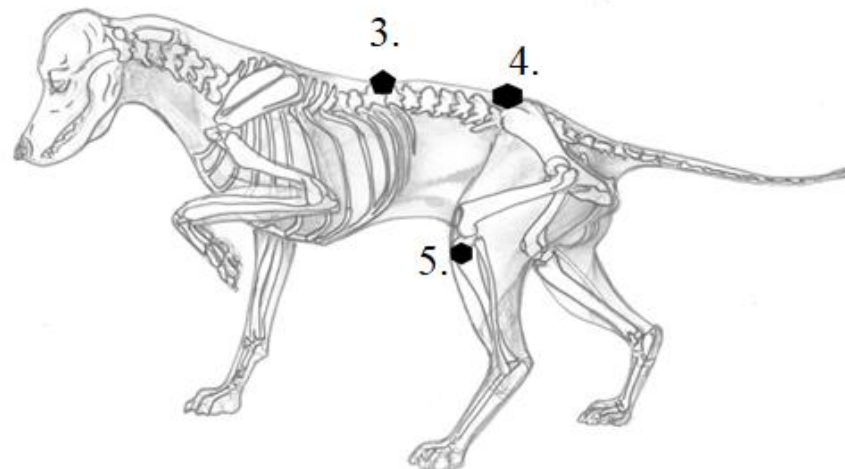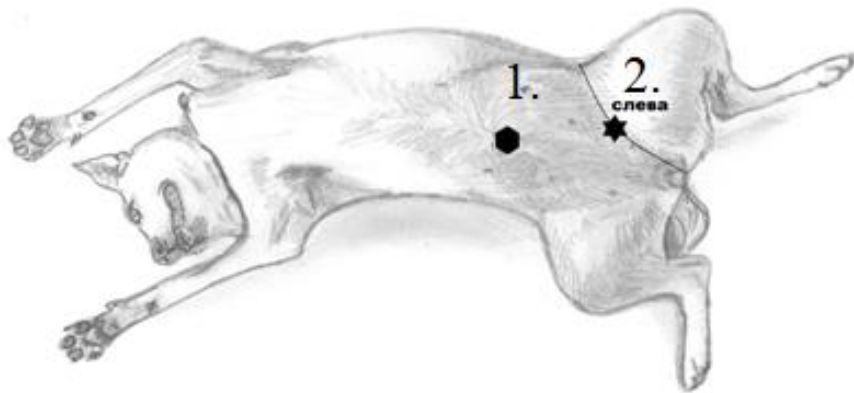

Острый гепатит

Лечение в течении 2-х недель, ежедневно, 1 раз в день, по 5 минут на каждую зону:



1. на передней лапе, по середине лучезапястной складки у подушечки;
2. под мечевидным отростком грудины, область эпигастрия;
3. на середине реберной дуги справа;
4. на пупок;
5. на свободный край 12 ребра справа.

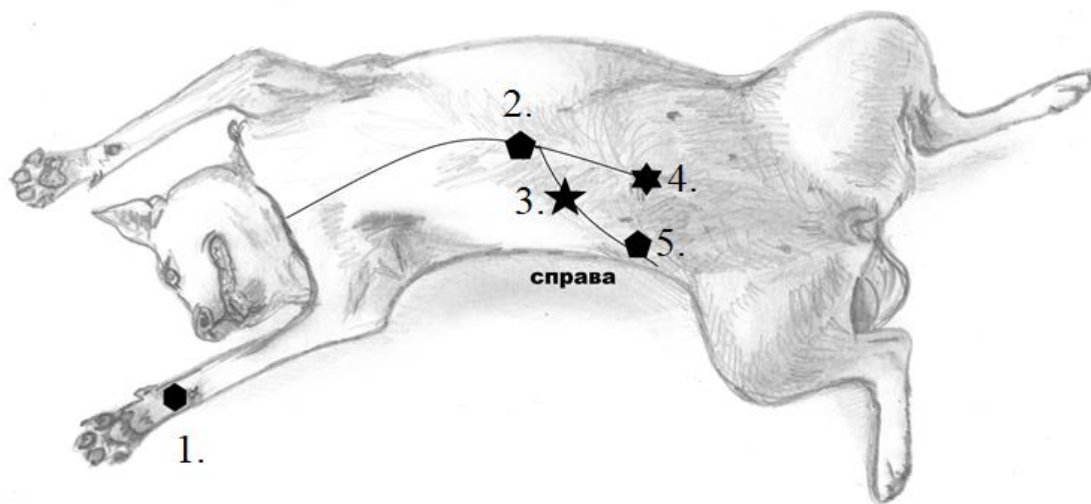

ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ, ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ

Лечение длительное курсами 4-5 раз в год, по 10 дней, ежедневно, по 10 минут на каждую точку:



1. под мечевидным отростком грудины, область эпигастрия;
2. на середине реберной дуги справа;
3. на свободный край 12 ребра справа;
4. под затылочной костью.

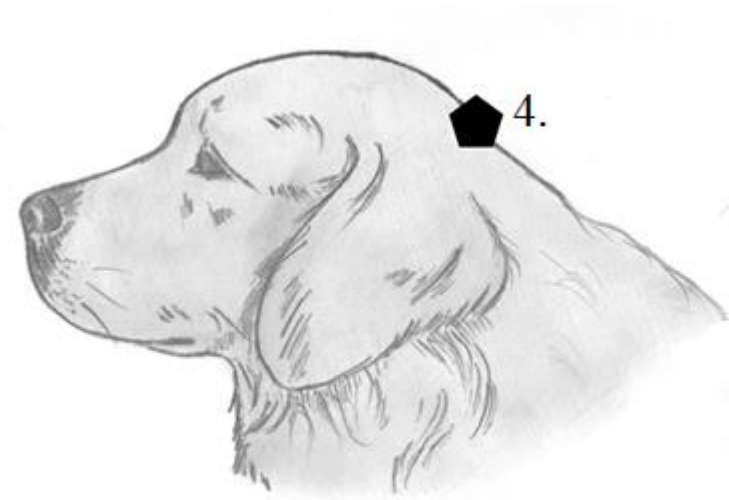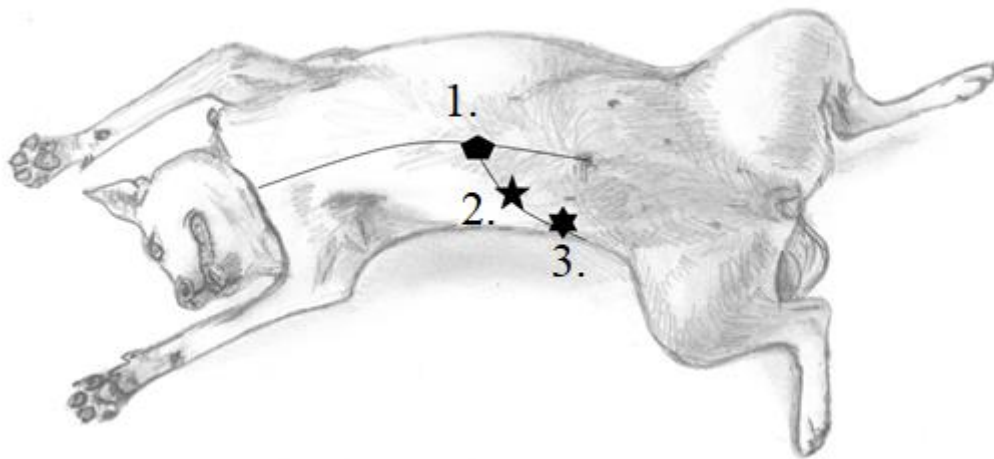

ПАНКРЕАТИТ

В острый период, 5-7 дней, лечение проводится ежедневно, 2-3 раза в день, по 5 минут на зону. Далее один раз в сутки до полного исчезновения симптомов (10-14 дней), по 5 минут на зону. В целях профилактики хронического панкреатита 3-4 раза в год по 7-10 ежедневных процедур, 1 раз в день, по 5 минут на зону. Зоны для терапии:


1. Под затылочной костью;
2. на область между остистыми отростками 12-13 грудных позвонков;
3. на передней лапе, по середине лучезапястной складки у подушечки;
4. под мечевидным отростком грудины, область эпигастрия;
5. на свободный край 12 ребра слева;
6. чуть выше внутреннего мыщелка большеберцовой кости.

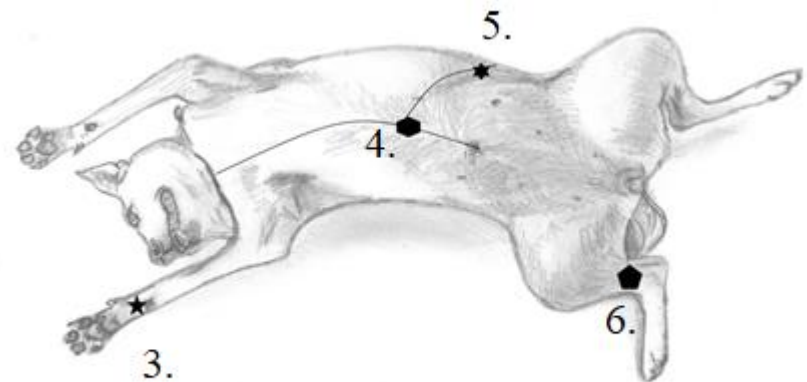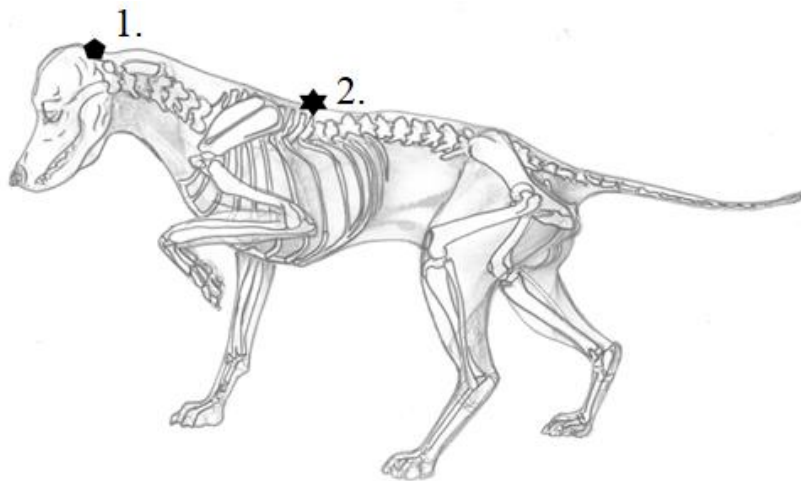

ГЕМОРРОЙ И ПАРАПРАКТИТ

Лечение в течении 2-3 недель, ежедневно, 1 раз в день, по 10 минут на область вокруг ануса (через салфетку) и по 5 минут на три зоны:

1. Под затылочной костью;
2. на область между остистыми отростками 6-7 поясничных позвонков;
3. на промежности ниже ануса.

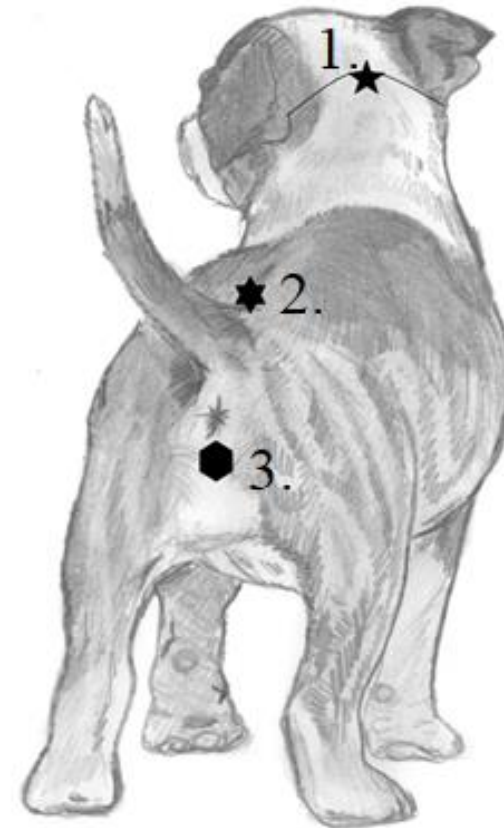


БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

НЕФРИТ

Лечение комплексное и длительное, курсами 4 раза в год, по 10 дней, ежедневно, 1 раз в день. В острый период, в течении первых 2-3 суток, 2 раза в день, далее, ежедневно, 1 раз в день, 3 недели. По 5 минут на зону:



1. на задней лапе под плюсневой подушечкой;
2. на передней лапе по центру запястной складки;
3. Под затылочной костью;
4. Между 9-10 ребрами, с двух сторон.

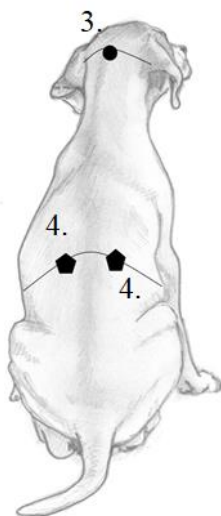

УРОЦИСТИТ

В острый период, в течении первых 2-3 суток, 2 раза в день, далее ежедневно, 1 раз в день, 7-10 дней. По 5 минут на зону:


1. на задней лапе под плюсневой подушечкой;
2. по центру грудины (на линии проведенной подмышками);
3. на лонный бугорок таза;
4. чуть выше внутреннего мыщелка большеберцовой кости.

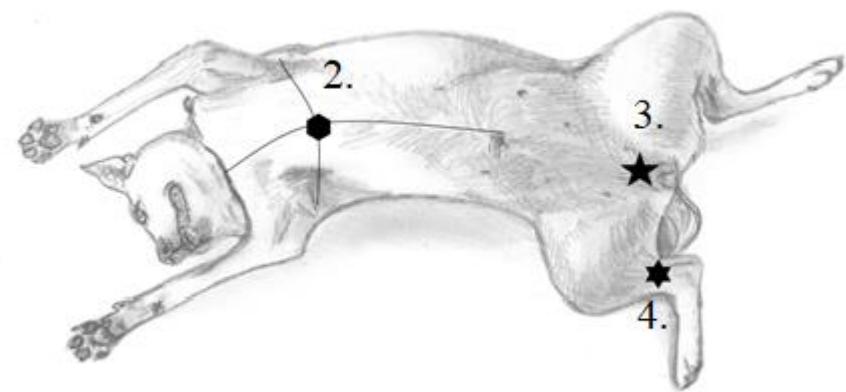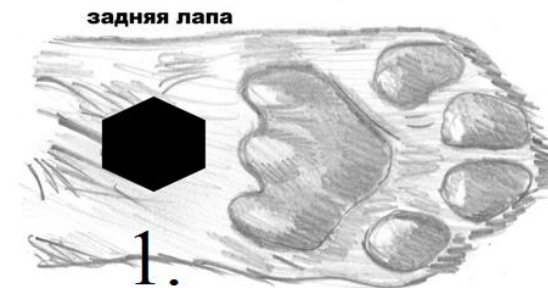

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

Лечение комплексное и длительное, курсами 4 раза в год по 10 дней, ежедневно, 1 раз в день. В острый период в течении первых 2-3 суток, 2 раза в день, далее ежедневно, 1 раз в день, 14 дней. По 5 минут на зону:


1. на задней лапе под плюсневой подушечкой;
2. под коленом на большеберцовой кости;
3. под затылочной костью;
4. между 9-10 ребрами, с двух сторон.

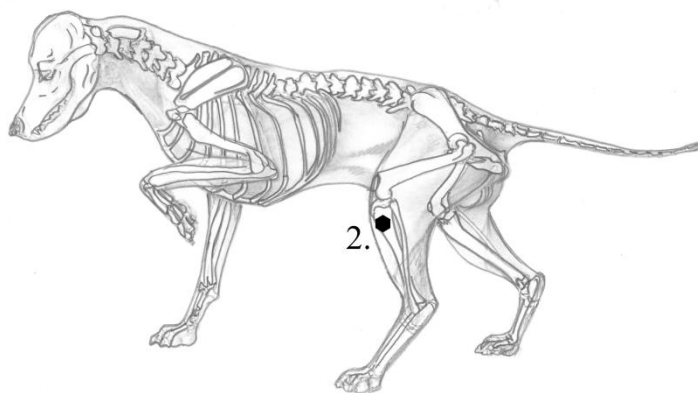

ВОСПАЛЕНИЕ СЕМЕННИКОВ

Процедуры ежедневные, 12-14 дней. В острый период, в течении первых 2-3 суток, 2 раза в день, далее ежедневно, 1 раз в день. На яички местно, по 5 минут и по указанным зонам:



1. под коленом на большеберцовой кости;
2. чуть выше внутреннего мыщелка большеберцовой кости;
3. на область между остистыми отростками 6-7 поясничных позвонков;
4. на промежности ниже ануса.

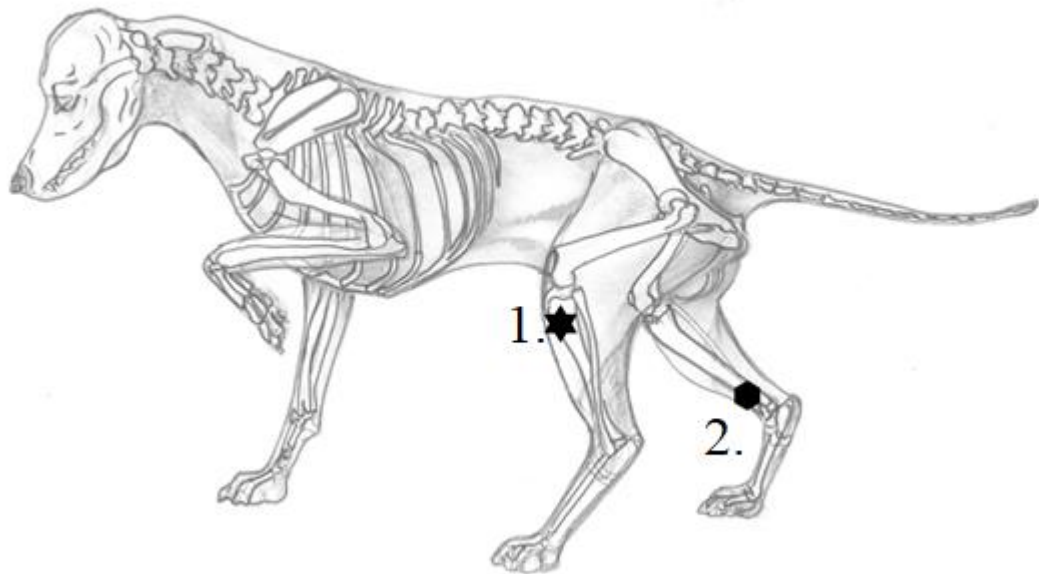

ВОСПАЛЕНИЕ ПРИДАТОЧНЫХ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ, КИСТА ЯИЧНИКА

Процедуры ежедневные, 12-14 дней. В острый период, в течении первых 2-3 суток, 2 раза в день, далее ежедневно, 1 раз в день. Курс повторять через 3-4 месяца. По 5 минут на зону:

1. под нижнее основание ушного хряща;
2. между остистыми отростками 4-5 поясничного позвонков;
3. на основание хвоста;
4. середина паховой складки с двух сторон;
5. на лонный бугорок таза.

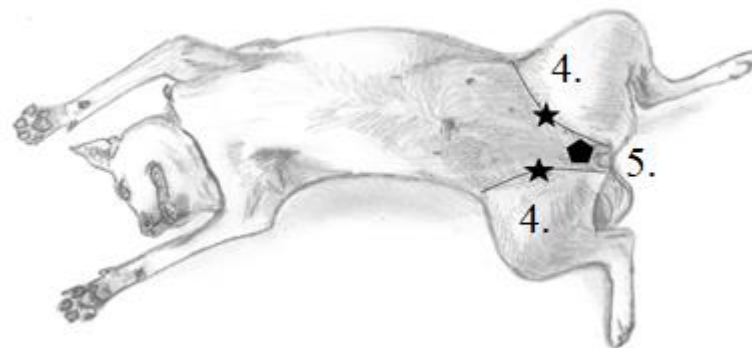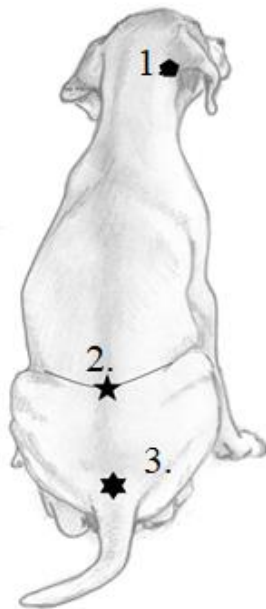


БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ

Владельцу молодой собаки не нужно рассчитывать на «природу». Животному необходима обязательная помощь, поскольку не всегда природные инстинкты просыпаются у домашних животных.

ПОДГОТОВКА К БЕРЕМЕННОСТИ

За месяц до вязки провести противопаразитарную терапию и проводить общеукрепляющие процедуры в течении 2-х недель, через день, 1 раз в день, по 5 минут на зону:


1. по центру грудины (на линии проведенной подмышками);
2. по середине паховой складки с двух сторон.

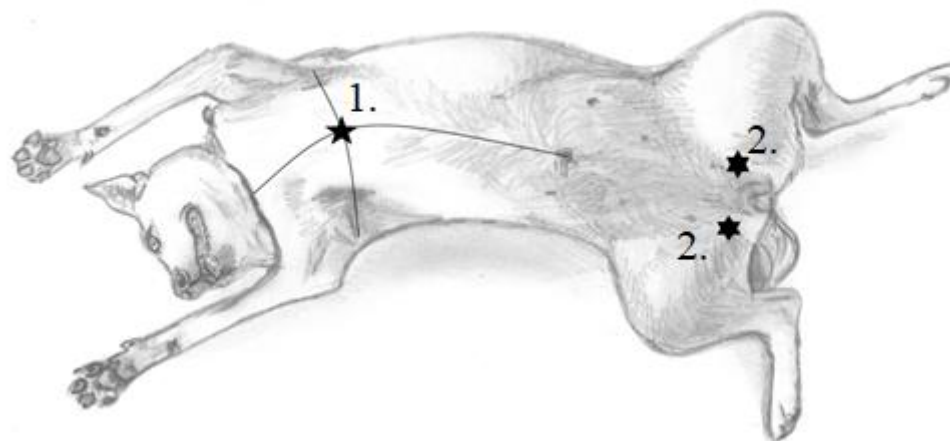

ПРИ ТОКСИКОЗЕ

Процедуру проводить 1 раз в день - на ночь, во все дни утренней рвоты, по 5 минут на каждую точку:

1. на передней лапе по центру запястной складки;
2. по центру грудины (на линии проведенной подмышками);
3. на пупок.


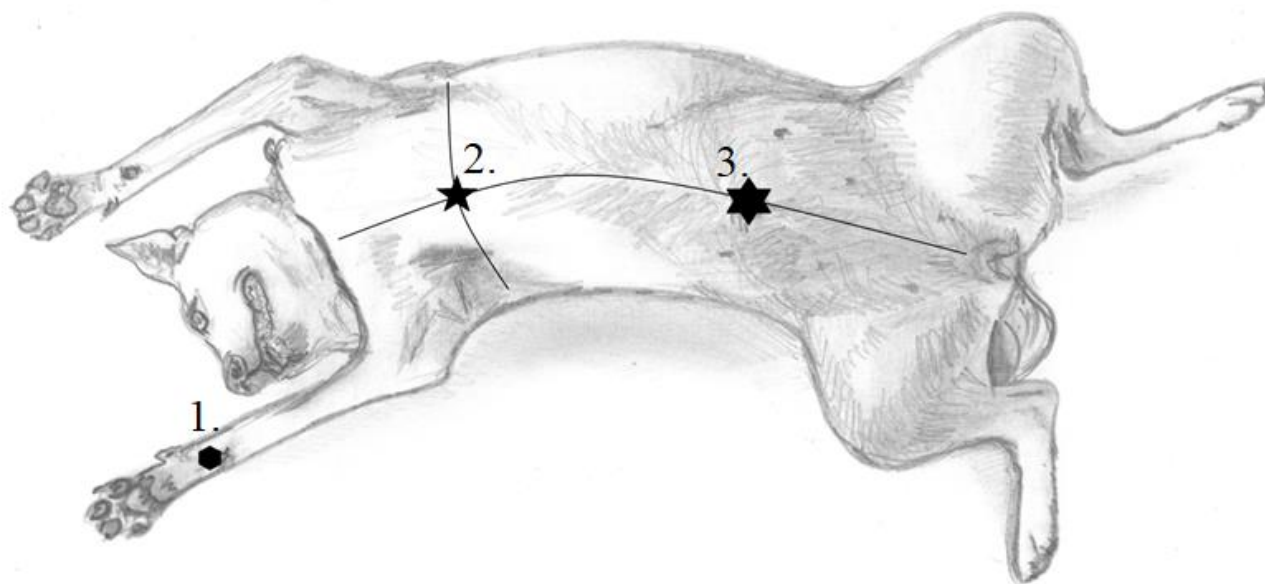


ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ

Беременность у собак длится приблизительно 50-70 дней. Так, представительницы мелких пород (йоркширский терьер, пекинес, чиахуахуа) вынашивают потомство около 2 месяцев – 53-60 дней, а у крупных собак (дог, лабрадор, мастиф) беременность может длиться дольше – до 70-72 дней. За сутки до родов температура тела снижается до 37. Собака может стать беспокойной, отходят воды, через сутки начинаются схватки.

При беспокойстве и болезненных схватках, каждые 2-3 часа, по 5 минут на зону:


1. на пупок;
2. между остистыми отростками 4-5 поясничного позвонков;
3. на основание хвоста;

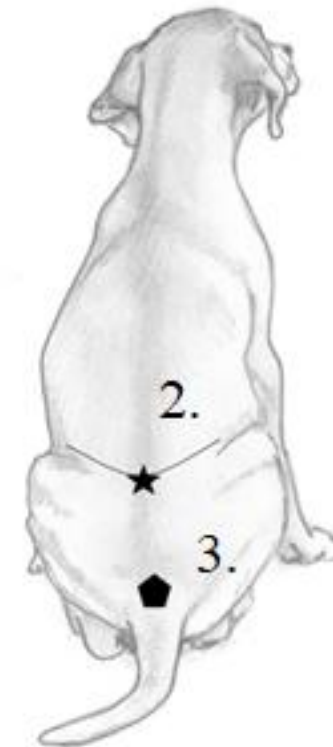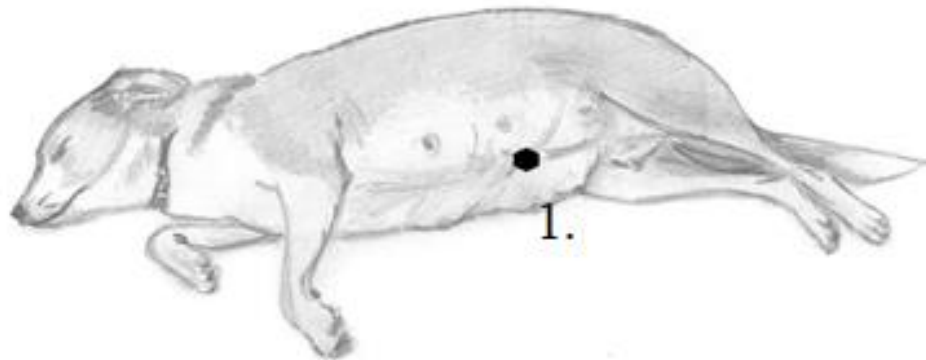

ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ начинается с появления первого щенка, и может длиться до суток. В этот период, если все идет нормально, лучше не беспокоить животное. Нужно наблюдать за щенками и проверять, освобождены ли они от околоплодных пузырей, и быть осторожным при случайных травмах, которые сука может случайно нанести щенкам.

При больших промежутках между рожденьями щенков проводить короткую процедуру, по 5 минут на зоны:


1. на нижнее основание уха;
2. на локтевой сгиб;
3. под коленом на большеберцовой кости.

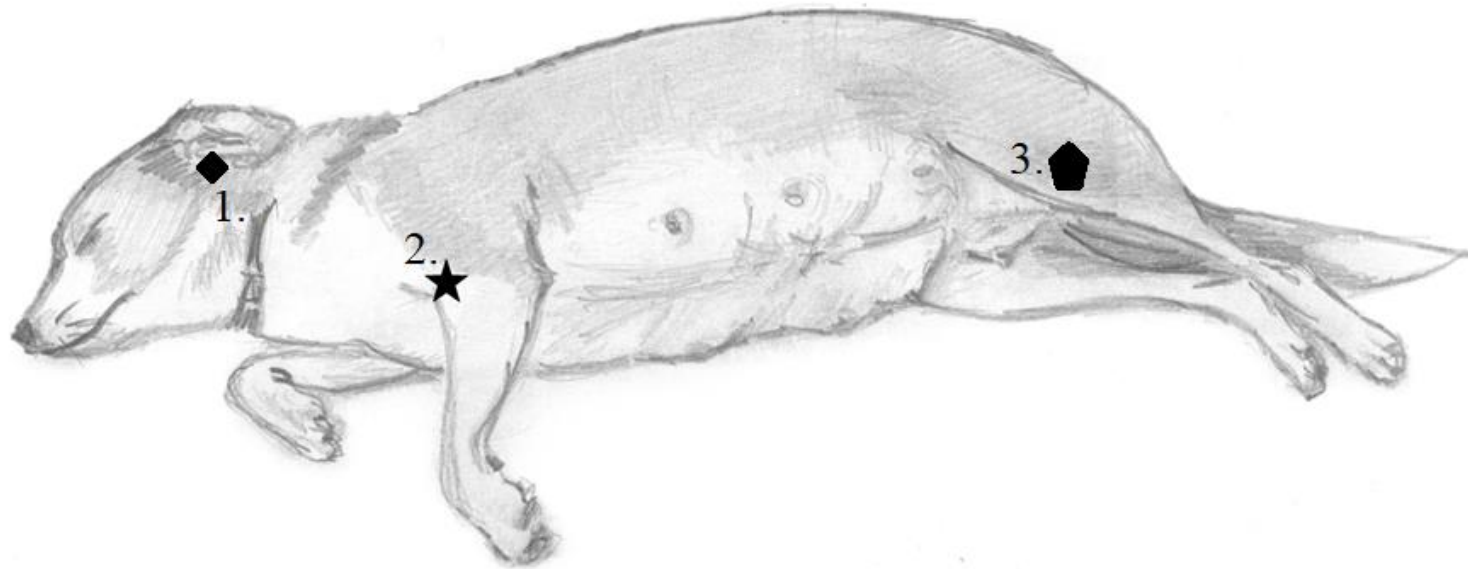

ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД

Вагинальные выделения идут 2-4 недели, и не имеют специфического запаха. После родов, для профилактики осложнений, проводить процедуры в течении 7-10 дней, ежедневно, 1 раз в день, по 10 минут на точку:


1. на макушку;
2. на основание хвоста.

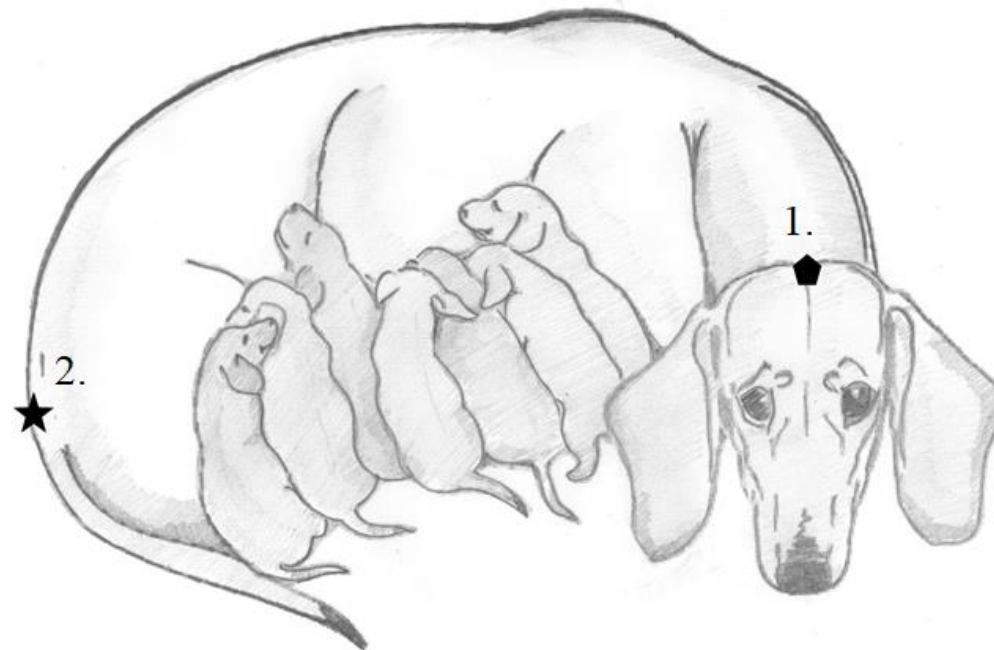

ЦЕРВИЦИТ, ЭНДОМЕТРИТ, КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ.


Лечение комбинированное, с применением медикаментов (10-14 дней). В первые 3-4 дня процедуру проводить 2 раза в день, по 5 минут на каждую точку. Далее - 1 раз в день, по 5 минут на каждую точку, до полного исчезновения симптомов:

1. на пупок;
2. на середину паховой складки с двух сторон;
3. на лонный бугорок (или операционный шов после Кесарево сечения).

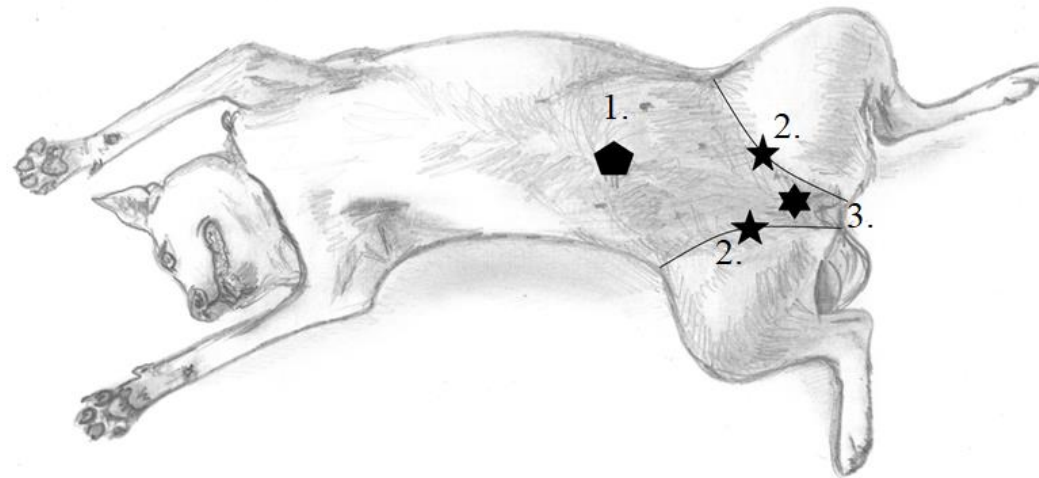

МАСТИТ

Лечение местно, на молочную железу, ежедневно, после каждого кормления, по 10 минут, на уплотнение, а также на зону между ушами, по 5 минут до полного исчезновения симптомов воспаления. В запущенных случаях необходима комбинированная терапия и хирургическое пособие.

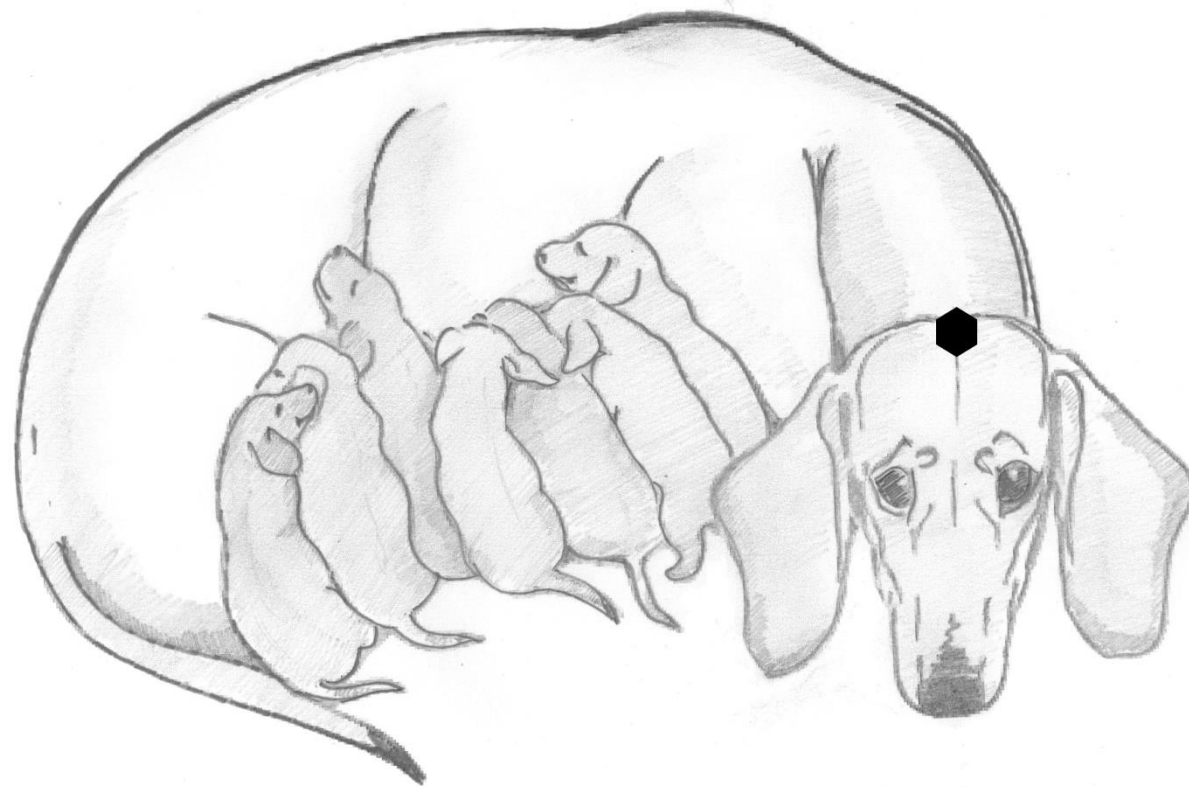

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТОВ МИНИТАГ, КАМЕРТОН, КАМЕРТОН ЗДОРОВЬЯ В ВЕТЕРИНАРИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОБАК

Калмыкова Елена Алексеевна - доктор медицинских наук, профессор, физиотерапевт, врач восстановительной медицины, заместитель генерального директора ООО НЦИМ «ЛИДО».

Замечания, вопросы и предложения направляйте по адресу:

123098, Москва, улица Новошукшинская, дом 7, корпус 1, ООО НЦИМ «ЛИДО», e-mail: scimlido@mail.ru

+7(926)780-72-04, +7(926)206-02-19 (Viber, WhatsApp, Telegram, SMS) +7(925)620-06-74

Сайты в Интернете: www.lido.su или www.lido.msk.ru

© Калмыкова Е.А., 2023 год

©ООО НЦИМ «ЛИДО», 2023 год

Издание первое.

Перепечатка и копирование допускается при:

- наличии ссылки на данное издание,
- надлежащем соблюдении авторских прав,

- сохранении данной редакции текста.